

Accu-Chek Instant paski testowe, 100 sztuk

Cena: 74,08 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków
Marka	ACCU-CHEK
Opakowanie	100 sztuk
Postać	Paski testowe
Producent	ROCHE DIABETES CARE POLSKA
Przeznaczenie	Cukrzyca
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis
Paski testowe przeznaczone do samodzielnego pomiaru glukozy we krwi przy użyciu aparatów Accu-Chek Active.

Zastosowanie
Do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Przydatne w samokontroli.

Sposób użycia
Nanoszenie krwi na pasek testowy:

opcja: test paskowy w glukometrze: włóż pasek do glukometru. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.
opcja: test paskowy poza glukometrem - przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wsuń test paskowy w kierunku pokazanym przez strzałki do prowadnicy. Test musi wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje miejsce. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą, chroniącą testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawania błędnych wyników.

Nieprzestrzeżenie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:



używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła,
nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami,
dokładnie i szczerze zamykaj pojemnik zbiorczy testów,
nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru,
nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.

Ważne

Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Nowe opakowania pasków nie zawierają klucza aktywacyjnego. Paski współpracują ze starymi kluczami, w przypadku problemów z obsługą serwis nieodpłatnie dosyła klucz.

Ostrzeżenia

- Wyrób medyczny Accu-Chek Instant należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Producent

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
Dział Diabetologii
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa