

## Aparat do inhalacji Spiriva HandiHaler, 1 sztuka

Cena: 10,03 zł



### Opis słownikowy

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn         |
| Opakowanie      | 1 sztuka                         |
| Postać          | Inhalator                        |
| Producent       | BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny, Akcesoria        |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów      |

### Opis produktu

#### Opis

**Spiriva Handihaler** to inhalator specjalnie zaprojektowany do używania z proszkiem do inhalacji Spiriva w kapsułkach.

#### Sposób użycia

1. W celu otworzenia górnej osłony należy wcisnąć, a następnie puścić przycisk przekłuwający.
2. Po otwarciu górnej osłony należy unieść ustnik.
3. Kapsułkę leku Spiriva należy umieścić w komorze centralnej bezpośrednio przed użyciem. Nie ma znaczenia którym końcem zostanie wprowadzona kapsułka.
4. Dokładnie zamknąć ustnik.
5. Trzymając aparat ustnikiem do góry należy wcisnąć przycisk przekłuwający, następnie go puścić. Lek został przygotowany do inhalacji.
6. Należy zrobić głęboki wydech.
7. Przyłożyć aparat do ust, szczelnie zacisnąć wargi wokół ustnika. Wykonać powolny wdech, głęboki (tak aby poczuć lub usłyszeć wibrację kapsułki). Jak najdłużej wstrzymać powietrze w płucach.
8. Wyjąć aparat z ust, powrócić do normalnego oddychania.
9. Powtórzyć punkty 6,7,8 w celu dokładnego opróżnienia kapsułki.
10. Ponownie otworzyć ustnik i wyrzucić zużytą kapsułkę.
11. Zamknąć ustnik i osłonę górną.

#### Uwagi

- Aparat do inhalacji Spiriva HandiHaler jest przeznaczony tylko do użytku z kapsułkami leku Spiriva.
- Nie należy używać produktu z innymi lekami.
- Produkt ważny jest przez rok od pierwszego użycia.
- Nigdy nie należy wydychać powietrza przez ustnik.

#### Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

BOEHRINGER INGELHEIM  
Wołoskiej 5  
Warszawa