

Aparat korekcyjny MARCIN II(na dzień) 1 sztuka

Cena: 25,33 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Haluksy
Opakowanie	2 sztuki
Postać	Aparat korekcyjny
Producent	NEURON S.C. JACEK JĘDRZEJCZAK REGINA RUDNICKA
Przeznaczenie	Haluksy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Ortezy mają na celu zapobieganie nakładaniu się palców, gdy stopa znajduje się w bucie. Jest to klin umieszczony między pierwszym a drugim palcem. Ta szyna łagodzi bolesny nacisk i zmniejsza tarcie między palcami.

Zastosowanie

Profilaktyka i leczenie skrzywienia palucha.

Sposób użycia

Po umyciu stopy umieść urządzenie między pierwszym a drugim palcem, otworem skierowanym do góry i najwęższym punktem do wnętrza stopy. To urządzenie jest wyposażone w dwa kołki umieszczone w centralnym otworze i używane w zależności od stopnia awarii. Kołek musi być całkowicie wsunięty w klin.

Producent

NEURON s.c.
ul. Grochowska 114,
04-301 Warszawa.