

Apteczka ABC Stopery tłumiki hałasu pianko

Cena: 1,93 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APTECZKA ABC
Opakowanie	1 opakowanie
Postać	-
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochrona narządu słuchu
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Stopery do uszu jednorazowego użytku z **Apteczki ABC** to produkty wykonane z delikatnej pianki poliuretanowej, która jest antyalergiczna i miękka w dotyku.

Zastosowanie

Stopery przeznaczone do redukcji hałasu.

Sposób użycia

- Czystymi rękoma powoli wałkuj i ściskaj stoper.
- Przy pomocy kciuka i wskazującego palca uformuj kształt stożka. Stoper należy mocno wałkować, aż do momentu uzyskania możliwie jego najmniejszej grubości.
- Mocno trzymaj stoper. Drugą ręką, w kierunku do góry i na zewnątrz, odciągnij małżowinę uszną.
- Ściśnięty stoper włóż głęboko do kanału słuchowego.
- Natychmiast po włożeniu stopera przytrzymaj jego koniec przez 30-60 sekund, czyli do momentu, aż zatyczka wypełni cały kanał słuchowy.
- Ręką lub przy pomocy lustra sprawdź, czy cały stoper został wciśnięty do kanału słuchowego i jedynie jego końcówka jest widoczna na zewnątrz.
- Wyjmij stoper powoli, skrętnym ruchem, tak aby stopniowo zerwać zabezpieczenie.

Ważne wskazówki

- Chronić przed mrozem, światłem, kurzem, tłuszczem oraz produktami chemicznymi.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice