

Aqua-Gel, opatrunek hydrożelowy, średnica 6,5 cm, 5 sztuk



Cena: 36,81 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AQUA-GEL
Opakowanie	5 sztuki
Postać	Opatrunek
Producent	KIKGEL MIROŚŁAW KIK
Przeznaczenie	Gojące, Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aqua-Gel to medyczny opatrunek hydrożelowy, dostępny w zestawie 5 sztuk. Produkt zapewnia wilgotne środowisko na powierzchni rany i ma średnicę 6,5 cm.

Wskazania

Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy może być stosowany przy:

- oparzeniach I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne),
- oparzeniach słonecznych,
- owrzodzeniach,
- odleżynach,
- innych ranach przewlekłych, np. stopa cukrzycowa,
- otarcia, stłuczenia, obrzęki.

Działanie

Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy

- zapewnia wilgotne środowisko na powierzchni rany, co wspomaga oczyszczanie autolityczne z martwych tkanek oraz wpływa na procesy ziarninowania i naskórkowania rany,
- dobrze przylega do rany, lecz nie przykleja się do niej,
- jest hipoalergiczny - nie powoduje uczuleń,
- ma zdolności absorpcyjne, pochłania wysięk z rany i zatrzymuje go wraz z bakteriami,
- jest elastyczny i umożliwia opatrywanie trudno dostępnych części ciała,
- umożliwia obserwację powierzchni rany, dzięki swojej przezroczystości,
- umożliwia "oddychanie" rany,
- łagodzi powstawanie blizn przerostowych,

- działa kojąco w przypadku powierzchownych oparzeń i obrzęków spowodowanych np. przez ukąszenia owadów.

Sposób użycia

Aqua-Gel aplikuje się na powierzchnie rany dowolną stroną. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.

- Rozerwać torebkę i wyjąć foremkę z opatrunkiem.
- Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjąć hydrożel z foremki.
- Zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek.
- Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną. W tych sytuacjach konieczne jest chirurgiczne oczyszczenie rany przed zastosowaniem opatrunku.
- Opatrunek wyjęty z opakowania, a nie wykorzystany traci jałowość i nie może być użyty w późniejszym czasie.
- Do jednorazowego użytku.
- Ponowne użycie grozi zakażeniem rany.
- Zalecany czas utrzymywania opatrunku na ranie wynosi 48 godzin.
- Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu opatrunku można umieścić na jego zewnętrznej powierzchni warstwę gazy zwilżonej roztworem soli fizjologicznej.
- Przechowywać w temperaturze 0-25oC.
- Chronić od wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

KIKGEL
Curie-Skłodowskiej 7
Ujazd

Galeria

