


Aqua-Gel, sterylny opatrunek hydrożelowy, 5,5 cm x 11 cm, 1 sztuka

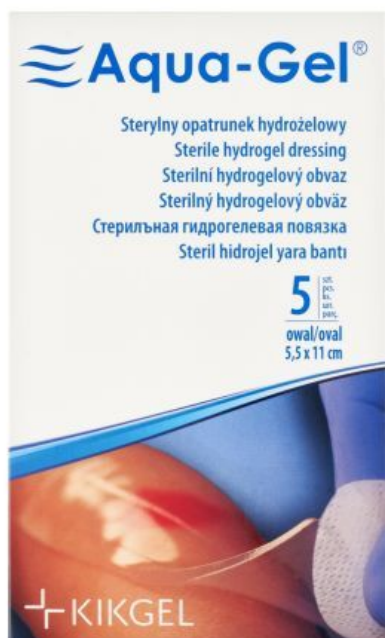

Cena: 7,74 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	KIKGEL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sterylnie hydrożelowe opatrunki **Aqua Gel** przeznaczone są do zabezpieczania ran o umiarkowanym wysięku, pokrytych martwicą lub będących w fazie naskórkowania. Zapewniają odpowiednio wilgotne środowisko na powierzchni rany, co sprzyja szybszemu gojeniu. Dzięki zdolności do absorpcji zatrzymują wysięk wraz z drobnoustrojami w swojej strukturze. Są elastyczne, łatwe do uformowania i dobrze dopasowują się nawet do trudno dostępnych obszarów ciała, takich jak twarz czy okolice stawów.

Składniki

Woda 90%, polimery.

Zastosowanie

- Oparzenia I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne).
- Oparzenia słoneczne.
- Owrzodzenia.
- Odleżyny.
- Inne rany przewlekłe (np. stopa cukrzycowa).
- Otarcia, stłuczenia, obrzęki.

Sposób użycia

- Opatrunek umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany.
- Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.
- Opatrunek należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną lub bandażem elastycznym.
- Opatrunek może być stosowany w kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych.
- Sposób aplikacji opatrunku: rozewnij torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem.

- Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjmij hydrożel z foremki.
- Zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek.
- Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.

Ostrzeżenia

Opatrunek nie jest zalecany w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną.

Ważne wskazówki

- Opatrunku nie należy używać, jeśli foliowa torebka jest otwarta lub uszkodzona.
- Wierzchnia folia ułatwia wyjęcie opatrunku, dlatego nie należy zdejmować jej przed wyjęciem opatrunku z foremki.
- Należy zawsze stosować opatrunki wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.
- Pomimo tego, iż opatrunek jest elastyczny nie należy go rozciągać przy nakładaniu na ranę i uważać, aby przylegał do zdrowej skóry wokół rany.
- Opatrunek wyjęty z opakowania, a niewykorzystany, traci jałowość i nie może być użyty w późniejszym czasie.
- Opatrunek przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Ponowne użycie stwarza ryzyko zakażenia rany.
- Zalecany czas utrzymania opatrunku na ranie wynosi 48 godzin.
- Częstotliwość zmiany opatrunku uzależniona jest od ilości wysięku wytwarzanego przez ranę.

Producent

Kikgel
ul. Skłodowskiej 7
97-225 Ujazd

Galeria

