

Aquacel Ag+ Extra, opatrunek hydrowłóknisty, 10 x 10 cm, 1 sztuka

Cena: 25,30 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opatrunek **Aquacel Ag+ Extra** jest chłonnym opatrunkiem, który charakteryzuje się wysokimi właściwościami absorpcyjnymi. Dzięki temu jest odpowiedni do stosowania w ranach z dużym wysiękiem, w tym również w ranach zakażonych. Produkt ma działanie antybakteryjne dzięki obecności jonów srebra. Te jony pomagają zwalczać bakterie w ranie, włączając w to bakterie odporne na antybiotyki, takie jak MRSA czy VRE. Dzięki temu opatrunek może pomóc w kontrolowaniu infekcji i wspierać proces gojenia się rany.

Wskazania

Opatrunek wskazany jest do stosowania na różnego rodzaju zainfekowane rany lub rany z podejrzeniem infekcji. Można go aplikować m.in.: na owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni (żylne, tętnicze oraz mieszane), odleżyny o pośredniej i pełnej grubości, rany chirurgiczne, pourazowe, rany narażone na krwawienie (np. na skutek chirurgicznego, czy mechanicznego oczyszczenia), rany onkologiczne z wysiękiem (np. ziarniniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńniowy), a także na rany, w których bakterie są przyczyną wolniejszego procesu leczenia i rany, w których nie obserwuje się postępu leczenia.

Działanie

Opatrunek Aquacel Ag+ Extra dzięki obecności jonów srebra niszczy biofilm bakteryjny, w tym także bakterie antybiotykooporne m.in.: MRSA, VRE. Produkt dostosowuje się dołożyska rany i żeluje w kontakcie z wysiękiem, co zapewnia optymalne, wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia. Dwie warstwy włókien szybko absorbują nadmiar wysięku wraz ze znajdującymi się w nim bakteriami i enzymami proteolitycznymi, natomiast pionowy kierunek wchłaniania zapobiega maceracji skóry wokół rany.

Stosowanie

- Produkt należy zmieniać w zależności od obrazu klinicznego rany i ilości wysięku, jednak nie rzadziej niż co 7 dni.
- W razie potrzeby produkt można dowolnie przycinać bez ryzyka utraty jego właściwości.



- W przypadku ran powierzchniowych opatrunek powinien pokrywać skórę na obszarze minimum 1 cm wokół rany, w przypadku ran głębokich należy wypełnić ją do 80% głębokości.
- Przy stosowaniu na rany z małym wysiękiem, po nałożeniu opatrunku należy zmoczyć obszar nad raną za pomocą sterylnego roztworu soli fizjologicznej.
- W przypadku zmniejszenia ilości wysięku i wyschnięcia opatrunku w trakcie stosowania, aby zdjąć go bezboleśnie należy zmoczyć go sterylnym roztworem soli fizjologicznej i odczekać, aż ponownie się zżeluje.

Producent
CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa