

Aquacel Ag Foam, opatrunek przylepny, 17,5 cm x 17,5 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)



Cena: 70,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Ochronne, Przeciwbakteryjne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

AQUACEL Ag to opatrunek w oparciu o unikalną technologię Hydrofiber ze srebrem jonowym na rany przewlekłe, (owrzodzenia gołeni na tle niewydolności żyłnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), o szerokim spektrum działania na wirusy i bakterie.

Wskazania

Opatrunki ze srebrem zalecane są przede wszystkim w przypadku ran, na powierzchni których stwierdzono biofilm i znajdują się w stanie poważnego zagrożenia infekcją. Aquacel Ag Foam może być więc nakładany bezpośrednio na:

- trudno gojące się rany przewlekłe,
- rany owrzodzeniowe, w tym owrzodzenia podudzi,
- odleżyny,
- oparzenia,
- rany pooperacyjne, w tym po przeszczepach,
- rozległe rany pourazowe.

Działanie

Opisane cechy opatrunku Aquacel Ag Extra są zgodne z jego przeznaczeniem i działaniem. Srebro jonowe, obecne w opatrunku, ma właściwości antybakteryjne i antywirusowe, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zakażenia rany. Zewnętrzna warstwa błony poliuretanowej zapewnia ochronę ran przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, co również przyczynia się do zmniejszenia ryzyka infekcji.

Dodatkowo, opatrunek Aquacel Ag Extra został zaprojektowany tak, aby utrzymywać odpowiedni poziom wilgoci w ranie poprzez kontrolowane odparowywanie nadmiaru wysięku. To pomaga w tworzeniu optymalnego środowiska dla procesu gojenia ran.

Skład

Sterylnie opatrunki piankowe, AQUACEL Ag Foam wykonane w Technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym składają się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej, z delikatnym, przylepnym obramowaniem. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz włókniny, warstwę kontaktową z raną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). Część kontaktowa z raną wykonana w Technologii Hydrofiber zawiera 1,2% w/w jonów srebra.

Sposób użycia

Przygotowanie i zastosowania opatrunku:

- Wybierz właściwy opatrunek do wielkości i kształtu rany, w celu zapewnienia, że część chłonna opatrunku jest co najmniej 1 cm większa niż obszar rany.
- Wyciągnij opatrunek ze sterylnego opakowania, bez kontaktu rąk z powierzchnią chłonną opatrunku i obszarem klejącym. Usuń warstwę zabezpieczającą jeśli używasz opatrunku w wersji przylepnej.
- Opatrunek może być dowolnie docinany, w zależności od kształtu i rozmiaru rany.
- Przyłóż opatrunek centralnie na ranę, z zachowaniem zasady 1 cm (część chłonna opatrunku powinna być większa co najmniej o 1 cm aniżeli obszar rany), W przypadku stosowania wersji przylepnej opatrunku delikatnie wygładzaj od wewnątrz na zewnątrz część lepną.
- Odpowiednie dodatkowe mocowanie lub taśmy powinny być wykorzystane do zabezpieczenia opatrunku na ranie w przypadku zastosowania wersji nieprzylepnej lub jeśli opatrunek w wersji przylepnej został pocięty.
- W przypadku trudnych do zaopatrzenia miejsc, takich jak pięta lub okolice kości krzyżowej wybierz specjalnie wyprofilowane opatrunki przylepne, g. Wyrzucić niewykorzystaną część opatrunku w przypadku przycinania lub po użyciu go na ranie.

Usuwanie opatrunku:

- Opatrunek powinien być zmieniony w zależności od obserwacji klinicznych (np.: wyciek, krwawienie, zwiększenie bólu). Maksymalny zalecany czas pozostawiania na ranie nie powinien przekraczać siedmiu dni.
- Rana powinna być oczyszczana w odpowiednich odstępach czasu.
- Aby usunąć opatrunek należy delikatnie docisnąć go do skóry i ostrożnie podnieść jeden róg opatrunku. Kontynuuj, aż wszystkie brzoży opatrunku będą odklejone. Ostrożnie podnieś opatrunek i wyrzucić zgodnie z lokalną procedurą usuwania wyrobów medycznych.

Przeciwwskazania

Opatrunki piankowe AQUACEL Ag Foam nie powinny być używane przez osoby z wrażliwą skórą lub, u których wystąpiły reakcje alergiczne na opatrunek lub na jakikolwiek z jego składników

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie używać ponownie.
- W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze poniżej 25
- Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa