

AQUACEL AG Foam, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 12.5 x 12.5 cm, 1 sztuka



Cena: 38,13 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	, plaster
Producent	CONVATEC LTD.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquacel Ag Foam to opatrunek piankowy, który jest miękki, wyjątkowo chłonny oraz zawiera jony srebra. Jest przeznaczony do opatrywania ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem. Działa antybakteryjnie, wspierając walkę z infekcją i hamując rozwój bakterii w obrębie rany. Dodatkowo, absorbuje wydzieliny z rany, co sprzyja właściwemu procesowi gojenia oraz zapobiega maceracji skóry.

Wskazania

Opatrunki ze srebrem zalecane są przede wszystkim w przypadku ran, na powierzchni których stwierdzono biofilm i znajdują się w stanie poważnego zagrożenia infekcją. Aquacel Ag Foam może być więc nakładany bezpośrednio na:

- trudno gojące się rany przewlekłe,
- rany owrzodzeniowe, w tym owrzodzenia podudzi,
- odleżyny,
- oparzenia,
- rany pooperacyjne, w tym po przeszczepach,
- rozległe rany pourazowe.

Skład

Sterylnie opatrunki piankowe, AQUACEL Ag Foam wykonane w Technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym składają się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej, z delikatnym, przylepnym obramowaniem. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz włókniny, warstwę kontaktową z raną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). Część kontaktowa z raną wykonana w Technologii Hydrofiber zawiera 1,2% w/w jonów srebra.

Sposób użycia

Jeżeli bezpośrednie, sterylne opakowanie opatrunku jest uszkodzone, nie należy go używać.

- Przed nałożeniem opatrunku oczyścić obszar rany odpowiednim środkiem do oczyszczania rany i osuszyć skórę wokół rany.
- Wybierz właściwy opatrunek do wielkości i kształtu rany, w celu zapewnienia, że część chłonna opatrunku jest co najmniej 1 cm

większa niż obszar rany.

- Wyciągnij opatrunek ze sterylne go opakowania, bez kontaktu rąk z powierzchnią chłonną opatrunku i w miarę możliwości z częścią lepą. Usuń warstwę zabezpieczającą jeśli używasz opatrunku w wersji przylepnej.
- Opatrunek może być dowolnie docinany, w zależności od kształtu i rozmiaru rany.
- Przyłóż opatrunek centralnie na ranę, z zachowaniem zasady 1cm (część chłonna opatrunku powinna być większa co najmniej o 1 cm aniżeli obszar rany), W przypadku stosowania wersji przylepnej opatrunku delikatnie wygładzaj od wewnątrz na zewnątrz część lepą.
- Odpowiednie dodatkowe mocowanie lub taśmy powinny być wykorzystane do zabezpieczenia opatrunku na ranie w przypadku zastosowania wersji nieprzylepnej lub jeśli opatrunek w wersji przylepnej został pocięty.
- W przypadku trudnych do zaopatrzenia miejsc, takich jak pięta lub okolice kości krzyżowej wybierz specjalnie wyprofilowane opatrunki przylepne.
- Wyrzucić niewykorzystaną część opatrunku w przypadku przycinania lub po użyciu go na ranie.

Usuwanie opatrunku:

- Opatrunek powinien być zmieniony w zależności od obserwacji klinicznych (np.: wyciek, krwawienie, zwiększenie bólu). Maksymalny zalecany czas pozostawiania na ranie nie powinien przekraczać siedmiu dni.
- Rana powinna być oczyszczana w odpowiednich odstępach czasu.
- Aby usunąć opatrunek należy delikatnie docisnąć go do skóry i ostrożnie podnieść jeden róg opatrunku. Kontynuuj, aż wszystkie brzegi opatrunku będą odklejone. Ostrożnie podnieś opatrunek i wyrzucić zgodnie z lokalną procedurą usuwania wyrobów medycznych.

Przeciwwskazania

Opatrunki piankowe AQUACEL Ag Foam nie powinny być używane przez osoby z wrażliwą skórą lub, u których wystąpiły reakcje alergiczne na opatrunek lub na jakikolwiek z jego składników

Producent

BRISTOL MYERS SQUIBB CONVATEC
Armii Ludowej 26
Warszawa