

Aquacel Extra, opatrunek, 15 cm x 15 cm, 1 sztuka



Cena: 32,45 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquacel Extra, korzystając z technologii hydrofiber, zapewnia skuteczne zatrzymywanie wydzieliny i bakterii w strukturze opatrunku, zbudowanej z dwóch warstw włókien. Opatrunek ten, w rozmiarze 15 cm x 15 cm, wspiera ochronę delikatnej skóry i zapobiega maceracji.

Wskazania

Przewlekłe owrzodzenia, Epidermolysis bullosa.

Sposób użycia

Dla ran z wysiękiem

- Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.
- Opatrunek Aquacel Extra powinien pokrywać skórę na obszarze co najmniej 1 cm wokół rany.
- Po nałożeniu opatrunku należy go pokryć opatrunkiem nieprzepuszczającym wilgoci (np. Granuflex Extra Thin lub Versiva XC) lub innym odpowiednim opatrunkiem wtórnym. Szczegółowe instrukcje użytkowania można znaleźć na ulotkach dołączonych do opakowań opatrunków.
- Wszystkie rany należy poddawać częstej kontroli. Opatrunek Aquacel Extra należy zmieniać kiedy jest to klinicznie wskazane (np. w przypadku przeciekania, nadmiernego krwawienia lub podejrzenia infekcji).
- Opatrunek Aquacel Extra można, jeśli jest to wskazane, pozostawić na ranie przez okres do 7 dni (za wyjątkiem oparzeń, w przypadku których opatrunek można pozostawić na ranie przez okres do 14 dni).

Dla ran suchych

W dodatku do powyższych zaleceń:

- Opatrunek Aquacel Extra należy umieścić na ranie, a następnie zmoczyć wyłącznie obszar opatrunku nad raną sterylną wodą lub solą fizjologiczną (0,9% roztwór NaCl).
- Opatrunek należy przykryć opatrunkiem nieprzepuszczającym wilgoci, jak np. Granuflex Extra Thin, aby zapobiec wyschnięciu



opatrunku, a w rezultacie jego przyklejeniu do rany.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może wpłynąć na zwiększenie ryzyka infekcji oraz zakażenia krzyżowego. Fizyczne właściwości opatrunku mogą w przypadku powtórnego użycia nie zostać zachowane.

Tam, gdzie jest to wskazane, należy stosować odpowiednie środki wspomagające. (np. stosowanie kompresjoterapii przy opatrywaniu owrzodzeń żylnych nóg lub środków odciążających przy opatrywaniu odleżyn). W przypadku owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej należy kontrolować poziom glukozy, jak również stosować inne środki wspomagające. Infekcje nie stanowią przeciwwskazania do stosowania opatrunku Aquacel Extra. W przypadku rozwoju infekcji w trakcie stosowania opatrunku należy rozpocząć terapię antybiotykową zgodną ze wskazaniami klinicznymi, pod nadzorem lekarza. Opatrunek Aquacel Extra może być pomocny w tamowaniu mniejszych krwawień. Jeśli zdejmowanie opatrunku sprawia trudności, należy całkowicie nasączyć opatrunek sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl) lub wodą i powoli usunąć. Opatrunek Aquacel Extra wytwarza wilgotne środowisko ułatwiające rozwój nowych naczyń krwionośnych, na skutek czego w niektórych przypadkach delikatne, nowo utworzone naczynia mogą być źródłem wysięku o krwawym zabarwieniu. Opatrunek Aquacel Extra nie jest przeznaczony do stosowania jako gąbka chirurgiczna. Opatrunek Aquacel Extra nie jest przeznaczony do stosowania w wewnętrznych jamach ciała ani wewnątrz ran zamkniętych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa