

Aquacel Foam, opatrunek chłonny, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)

Cena: 14,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Aquacel Foam to chłonny opatrunek medyczny, który reguluje poziom wilgoci w ranie. Dzięki wielowarstwowej budowie części chłonnej doskonale absorbuje wysięk. Wersja nieprzylepna.

Wskazania

Opatrunek AQUACEL Foam posiada szerokie zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju ran. Może być stosowany jako opatrunek pierwotny w płytkich ranach bez oznak infekcji. Może również pełnić rolę opatrunku wtórnego, w połączeniu z opatrunkami AQUACEL Ag+ Extra w ranach zakażonych oraz z opatrunkami AQUACEL Extra w głębokich, czystych ranach. W przypadku żylnych owrzodzeń podudzi, opatrunek AQUACEL Foam jest skutecznym narzędziem terapeutycznym. Ponadto, dzięki swojej strukturze, opatrunek zatrzymuje wysięk, co pomaga w terapii kompresyjnej i chroni skórę przed uszkodzeniami. Może być również stosowany w profilaktyce powikłań, takich jak odleżyny, uszkodzenia skóry spowodowane tarcieniem czy długotrwałym kontaktem z wilgocią. Opatrunek AQUACEL Foam jest wszechstronnym rozwiązaniem w leczeniu ran, jednak przed jego zastosowaniem zaleca się konsultację z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

Skład

Zbudowany jest z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej o wysokiej paroprzepuszczalności, miękkiej warstwy absorbującej pianki, warstwy kontaktowej z raną wykonanej w technologii Hydrofiber.

Zastosowanie

Dla dorosłych do opatrywania ran pourazowych, odleżynowych, owrzodzeń, które są zainfekowane bądź charakteryzują się zwiększonym ryzykiem infekcji.

Sposób użycia

Przed założeniem opatrunku AQUACEL® Foam ranę należy oczyścić i zdezynfekować, a zdrową skórę wokół rany osuszyć. Należy wybrać taki rozmiar opatrunku, by zasłaniał on 1-2cm zdrowej skóry otaczającej ranę. Podczas zakładania opatrunku nie należy dotykać



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

jego części chłonnej i lepnej. Opatrunek należy skierować białą stroną do rany. Strona cielistą to zawsze strona zewnętrzna.

Przeciwwskazania

Opatrunki piankowe, AQUACEL™ Foam nie powinny być używane przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością lub, u których wystąpiły reakcje alergiczne na opatrunek czy którykolwiek z jego składników.

Producent

CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa