

Aquacel Foam, opatrunek chłonny, 12,5 cm x 12,5 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)

Cena: 22,06 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Aquacel Foam to chłonny opatrunek medyczny, który reguluje poziom wilgoci w ranie. Dzięki wielowarstwowej budowie części chłonnej doskonale absorbuje wysięk. Zewnętrzna, wodoodporna błona poliuretanowa tworzy barierę przed bakteriami i wirusami. Wersja przylepna.

Przeznaczenie

Do stosowania na rany powierzchowne, ostre i przewlekłe wydzielające dużą ilość wysięku oraz jako opatrunek wtórny dla opatrunków pierwotnych. Aquacel Foam zalecany jest w leczeniu żylnego owrzodzenia podudzi, czy niwelowanie sił nacisku w leczeniu odleżyn.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem opatrunku umyć dokładnie ręce.
- Oczyszczyć ranę solą fizjologiczną lub lawaseptykiem i osuszyć otaczającą skórę.
- Część chłonna opatrunku powinna być o 1 cm większa niż obszar rany. Jest możliwość docinania opatrunku w razie potrzeby.

Właściwości

Wyrób medyczny zbudowany jest z dwóch części – zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniającej wodoszczelność oraz stanowiącej barierę dla wirusów i bakterii. Błona ta chroni ranę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, co zmniejsza ryzyko zakażenia. Pomaga także zapewnić odpowiedni poziom odparowywania wilgoci zawartej w wysięku, który jest wchłaniany przez opatrunek. Opatrunek piankowy zawiera dodatkową warstwę pianki chroniącej wrażliwą skórę przed urazami. Górna warstwa Aquacel Foam jest przepuszczalna dzięki czemu odparowuje wilgoć.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykiety.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Uwagi

- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni.
- Opatrunek może być stosowany na zakażone rany pod nadzorem lekarza.

Producent

CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa