

Aquacel Foam, opatrunek chłonny, 21 cm x 21 cm, 1 sztuka (z opakowania 5 sztuk)



Cena: 56,82 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Aquacel Foam to opatrunek chłonny, który wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci w ranie. Dzięki wielowarstwowej konstrukcji część chłonna skutecznie pochłania wysięk. Zewnętrzna wodoodporna membrana poliuretanowa zapewnia ochronę przed bakteriami i wirusami. Dostępny w wersji przylepnej.

Przeznaczenie

Do stosowania na rany powierzchniowe, ostre i przewlekłe wydzielające dużą ilość wysięku oraz jako opatrunek wtórny dla opatrunków pierwotnych. Aquacel Foam zalecany jest w leczeniu żylnego owrzodzenia podudzi, czy niwelowanie sił nacisku w leczeniu odleżyn.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem opatrunku umyć dokładnie ręce.
- Oczyszczyć ranę solą fizjologiczną lub lawaseptykiem i osuszyć otaczającą skórę.
- Część chłonna opatrunku powinna być o 1 cm większa niż obszar rany. Jest możliwość docinania opatrunku w razie potrzeby.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Uwagi



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni.
- Opatrunek może być stosowany na zakażone rany pod nadzorem lekarza.

Producent

CONVATEC

Al. Armii Ludowej 26

00-843 Warszawa

dzial.pomocy@convatec.com