

Aquacel Foam, opatrunek przylepny na piętę, 19,8 cm x 14 cm, 1 szt. (z opakowania 5 szt.)

Cena: 37,15 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC LTD.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aquacel Foam to opatrunek chłonny, który zarządza wilgotnością rany. Jego wielowarstwowa struktura efektywnie wchłania wysięk, a specjalny kształt idealnie nadaje się do opatrywania ran na pięcie. Produkt dostępny jest w wersji przylepnej.

Przeznaczenie

Do stosowania na rany powierzchniowe, ostre i przewlekłe wydzielające dużą ilość wysięku oraz jako opatrunek wtórny dla opatrunków pierwotnych. Aquacel Foam zalecany jest w leczeniu żylnego owrzodzenia podudzi, czy niwelowanie sił nacisku w leczeniu odleżyn.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem opatrunku umyć dokładnie ręce.
- Oczyszczyć ranę solą fizjologiczną lub lawaseptykiem i osuszyć otaczającą skórę.
- Część chłonna opatrunku powinna być o 1 cm większa niż obszar rany. Jest możliwość docinania opatrunku w razie potrzeby.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent

CONVATEC
Al. Armii Ludowej 26



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Warszawa