

Askina Calgitrol Paste, 5 tubek po 15 g

Cena: 35,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 sztuk po 15 g
Postać	Tubka
Producent	AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oparzenia, Rany cukrzycowe, Rany z dużym wysiękiem
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Askina Calgitrol Paste to specjalistyczna pasta srebrowa, która łączy polisacharydową strukturę alginianu z jonami srebra. Dzięki zdolności do dokładnego dopasowania do kształtu rany oraz bezpośredniemu kontaktowi jonów srebra z jej łóżyskiem, skutecznie wspiera leczenie ran o nieregularnym kształcie, kieszeniowych czy przetokowych, takich jak stopa cukrzycowa czy oparzenia II stopnia.

Wskazania

- Odleżyny I – IV stopnia
- Owrzodzenia podudzi
- Stopa cukrzycowa
- Oparzenia II stopnia

Działanie

Askina Calgitrol Paste jest sterylnym opatrunkiem w paście, zawierającym alginian srebra w formie jonów, co powoduje wydłużone uwalnianie aktywnych jonów srebra i wzmacnia skuteczność antybakteryjną, a także pomaga zabezpieczać ranę przed zewnętrznymi zakażeniami i bakteriami. Przy obecności wysięku, alginian srebra utrzymuje środowisko wilgotne w ranie sprzyjając jej naturalnemu gojeniu się.

Sposób użycia

- Wstrząsnąć tubkę przed użyciem
- Nałożyć cienką warstwę pasty na całą powierzchnię rany
- Kaniula umożliwia łatwą aplikację do ran tunelowych i małych przetok
- Na dużych powierzchniach pasta może być łatwo rozprowadzona dłońmi; należy pamiętać o założeniu rękawiczek
- Łatwe i bezbolesne usuwanie z rany przez irygację.

Przeciwwskazania



Askina Calgitrol Paste nie powinna być stosowana u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na alginiany i srebro, gdy przeciwwskazaniem jest obecność metali, powstałego w wyniku infekcji owrzodzenia, gruźlicy, kiły, silnego zakażenia grzybiczego oraz oparzeń III stopnia.

Ostrzeżenia

- W przypadku zakażenia szpitalnego, miejscowa terapia jonami srebra nie może zastąpić ogólnoustrojowego leczenia lub adekwatnej kuracji antybakteryjnej.
- Klinicyści/pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość, że dostępnych jest bardzo niewiele danych dotyczących przedłużonego i wielokrotnego stosowania wyrobów zawierających srebro, szczególnie u dzieci i noworodków. Obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań co do stosowania srebra w pediatrii.

Producent

BRAUN