

Aspiator kataru Pan Nosek APTEO, 1 sztuka

Cena: 49,56 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	aspirator
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aspirator do nosa Pan Nosek to bezpieczne i praktyczne urządzenie przeznaczone do usuwania zalegającej wydzieliny z nosa u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych. Jego konstrukcja umożliwia łatwe składanie, rozkładanie i czyszczenie – wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą. Nagromadzona wydzielina może utrudniać oddychanie, pogarszać samopoczucie i prowadzić do poważniejszych dolegliwości, takich jak zapalenie zatok, uszu, oskrzeli czy płuc. Dlatego tak istotne jest regularne oczyszczanie nosa z zalegających substancji.

Sposób użycia

- Połącz elementy aspiratora zgodnie z rysunkiem dołączonym do opakowania.
- Połącz niebieską wkładkę z rurą ssącą do odkurzacza domowego (o mocy 800-1800 W). Uruchom odkurzacz. W zależności od potrzeb i oczekiwanej siły ssącej, użyj regulatora znajdującego się na aspiratorze pomiędzy komorami I a II. Zmianę uzyskuje się poprzez przekręcenie ich względem siebie w celu zwiększenia/zmniejszenia pola powierzchni otworu.
- Przyłóż końcówkę aspiratora do przedsionka nosa (niewskazane jest penetrowanie komory nosa) i odciągaj katar z każdej przegrody nosowej przez czas nie dłuższy niż 5-10 sekund.
- W przypadku nieodciągnięcia zalegającej wydzieliny ponów proces jej odciągania.
- Po zabiegu rozłóż aspirator i umyj go pod bieżącą wodą.
- Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może spowodować zaleganie bakterii i wirusów we wnętrzu aspiratora oraz spowodować zanieczyszczenie mechaniczne wyrobu.

Przeciwwskazania

- Uszkodzona błona śluzowa nosa.
- Obrzęk błony śluzowej nosa.
- Krwawienie z nosa.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent
SYNOPTIS PHARMA