

# Aspirator NOVAMA Pingo elektryczny do nosa



Cena: 172,86 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	aspirator
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka

## Opis produktu

### Opis

Aspirator nosowy **Pingo Novama Kids** to elektroniczne urządzenie zaprojektowane z myślą o najmłodszych. Skutecznie i łatwo eliminuje wydzielinę z nosa, stanowiąc idealne rozwiązanie dla dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 12 lat.

### Zastosowanie

Do usuwania wydzieliny z nosa w warunkach domowych u niemowląt i dzieci do 12 roku życia.

### Sposób użycia

- Dobierz odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka oraz rodzaju wydzieliny.
- Upewnij się, czy końcówka została dobrze założona i czy całkowicie obejmuje pierścień zabezpieczający na wylocie głowicy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika ON/OFF, aby rozpocząć odsysanie wydzieliny.
- Utrzymuj głowę dziecka prosto (w pionie) i wprowadź końcówkę do jednego z nozdrzy.
- Uważaj, aby nie wepchnąć końcówki zbyt głęboko do nozdrza lub aby nie napierać na tylną ścianę jamy nosowej.
- Staraj się utrzymywać aspirator w takiej pozycji, aby końcówka była prostopadła do powierzchni twarzy dziecka.
- Nie kieruj końcówki w górę, w głąb nozdrza dziecka. Poczekaj, aż aspirator wciągnie wydzielinę.
- W razie konieczności czynność powtórz w drugim nozdrzu lub przeprowadź ponownie.
- Zwolnij przycisk, aby zakończyć odsysanie.

### Właściwości

- zasilany bateryjnie,
- łatwy i wygodny w obsłudze,
- lekki i cichy,
- łatwy w czyszczeniu,
- ma silikonowe nakładki w 2 rozmiarach.
- odtwarza 12 melodijek,



- bez konieczności używania akcesoriów jednorazowych.

#### Ważne wskazówki

- Urządzenie nie może być stosowane samodzielnie przez dzieci.
- Nie stosuj urządzenia w przypadku krwawienia z nosa, poważnych obrażeń twarzy, szyi, głowy, zaburzenia krzepnięcia.

#### Producent

Novama Cloud S.A.  
ul. Traktorowa 143  
91-203 Łódź