

Atrauman Ag, opatrunek z maścią, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Cena: 15,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opatrunek Atrauman Ag jest skutecznym środkiem przeciwbakteryjnym, który zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne, jak i gram-dodatnie, w tym szczepy MRSA. Ma to duże znaczenie w leczeniu zakażonych ran, gdzie obecność tych bakterii może utrudniać proces gojenia.

Jedną z zalet Atrauman Ag jest specjalna warstwa zewnętrzna materiału nośnego oraz zastosowana maść, które zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany. Dzięki temu opatrunek może być zmieniany bezboleśnie, co jest szczególnie istotne w przypadku bolesnych ran.

Dodatkowo, maść zawarta w opatrunku Atrauman Ag pielęgnuje brzegi rany, utrzymuje ich elastyczność i pomaga w procesie gojenia się. Opatrunek charakteryzuje się także wysoką przepuszczalnością dla powietrza, pary wodnej oraz wydzieliny rany. Dzięki temu otoczenie rany jest odpowiednio nawilżone, co sprzyja gojeniu się tkanek.

Składniki

Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych).

Stosowanie

1. Wyjmij opatrunek z opakowania.
2. Odklej papierową warstwę ochronną z jednej strony i przyłóż produkt do rany.
3. Usuń warstwę ochronną z drugiej strony.
4. W celu usuwania nadmiaru wydzieliny zastosuj dodatkowy, jałowy opatrunek chłonny.
5. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej opatrunek można zmieniać przy każdej zmianie opatrunku wtórnego.

Zastosowanie

Atrauman Ag jest skutecznym środkiem do miejscowego leczenia różnego rodzaju ran zakażonych. Może być stosowany zarówno w przypadku ran przewlekłych, jak i ostrych, włącznie z ranami oparzeniowymi drugiego stopnia. Jest również skuteczny w leczeniu ran z kolonizacją bakteryjną oraz jako środek zapobiegający infekcjom podczas leczenia ran, zwłaszcza u pacjentów o osłabionym układzie immunologicznym.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice