

Atrauman Ag, opatrunek z maścią, 10 cm x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 29,79 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Atrauman Ag to sterylny opatrunek siatkowy, wzbogacony srebrem metalicznym i nasączony maścią z roślinnymi kwasami tłuszczowymi. Jest to wyrób medyczny.

Wskazania

Opatrunek Atrauman Ag wskazany jest do leczenia wspomagającego ran zainfekowanych (przewlekłych i ostrych) oraz jako dodatkowy środek zapobiegający infekcjom w trakcie terapii ran.

Działanie

Pod wpływem wilgotnego środowiska rany z opatrunku uwolnione zostają jony srebra, które wykazują działanie bakteriobójcze (na bakterie gram-ujemne np. *Klebsiella pneumoniae* oraz na bakterie gram-dodatnie np. *Staphylococcus aureus*, także na szczepy MRSA). Maść z triglicerydów pielęgnuje brzegi rany i zapewnia ich elastyczność. Opatrunek nie przywiera, przepuszcza wysięk i zapewnia dobrą wentylację i utlenienie rany.

Mikrobiologiczne działanie produktu trwa co najmniej 7 dni.

Skład

Opatrunek wykonany został z hydrofobowej siatki poliamidowej z dodatkiem srebra metalicznego i maści z triglicerydów. Produkt nie zawiera wazeliny i innych składników na bazie parafiny.

Stosowanie

1. Wyjmij opatrunek z opakowania.
2. Odklej papierową warstwę ochronną z jednej strony i przyłóż produkt do rany.
3. Usuń warstwę ochronną z drugiej strony.
4. W celu usuwania nadmiaru wydzieliny zastosuj dodatkowy, jałowy opatrunek chłonny.
5. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej opatrunek można zmieniać przy każdej zmianie opatrunku wtórnego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ostrzeżenia

- Produkt jednorazowy, nie stosować ponownie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice