

Atrauman Ag, opatrunek z maścią, 5 cm x 5 cm, 1 sztuka

Cena: 5,88 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Atrauman Ag to jałowy opatrunek siatkowy z dodatkiem srebra metalicznego, impregnowany maścią zawierającą kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Jest to wyrób medyczny.

Składniki

Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych).

Stosowanie

1. Wyjmij opatrunek z opakowania.
2. Odklej papierową warstwę ochronną z jednej strony i przyłóż produkt do rany.
3. Usuń warstwę ochronną z drugiej strony.
4. W celu usuwania nadmiaru wydzieliny zastosuj dodatkowy, jałowy opatrunek chłonny.
5. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej opatrunek można zmieniać przy każdej zmianie opatrunku wtórnego.

Zastosowanie

Opatrunek Atrauman Ag jest przeznaczony do miejscowego leczenia różnego rodzaju ran zakażonych. Może być stosowany zarówno w przypadku ran przewlekłych, jak i ostrych, oparzeń drugiego stopnia oraz ran z krytyczną kolonizacją bakteryjną. Dodatkowo, opatrunek może być stosowany jako środek zapobiegawczy podczas leczenia ran, zwłaszcza u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym.

Działanie opatrunku opiera się na obecności maści srebrnej, która zawiera jony srebra. Te jony mają właściwości antybakteryjne i pomagają zwalczać zarówno bakterie gram-ujemne, jak i gram-dodatnie, w tym szczepy MRSA. Dzięki temu, opatrunek wspomaga proces gojenia się ran poprzez zwalczanie infekcji i ograniczanie rozwoju bakterii.

Opatrunek Atrauman Ag jest przyjazny dla skóry i nie przywiera do rany, co umożliwia bezbolesną wymianę opatrunku. Materiał nośny opatrunku jest elastyczny i dobrze przylega do rany, zapewniając ochronę i utrzymanie odpowiedniej wilgotności w obrębie rany. Opatrunek jest również przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego środowiska gojenia rany.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Sposób użycia

Opatrunek jest typową warstwą kontaktową i powinien być przykryty wtórnym opatrunkiem chłonnym.
W zależności od rodzaju rany można zastosować dowolnie wybrany opatrunek wtórny.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice