

Baby Boom Test owulacyjny paskowy LH 5 sztuk

Cena: 17,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	BABY BOOM
Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Test owulacyjny **Baby Boom** jest przeznaczony do oceny stężenia hormonu LH w moczu, z dokładnością wynoszącą co najmniej 99%. Test ten umożliwia wykrycie stężenia LH od 25 mIU/ml. Jedno opakowanie zawiera 5 testów.

Sposób użycia

- Wyznacz dzień wykonania testu zgodnie ze wskazaniami w instrukcji użycia.
- Zanurz pasek testowym w pojemniczku z moczem na 15 sekund.
- Wyjmij pasek i połóż go na płaskiej, niechłonnej, czystej powierzchni.
- Po 10 minutach odczytaj wynik.
- Interpretacja wyniku zgodnie z załączoną instrukcją.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro (IVD).
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce.
- Każdy test przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia nie należy używać ponownie tego samego testu.
- Nie używać testu, jeśli saszetka jest uszkodzona.
- Test wykonać natychmiast, po otwarciu saszetki.
- Po użyciu, test należy wyrzucić.
- Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia.
- Unikać kontaktu ze skórą.

Uwagi

Paskowy test owulacyjny: 5 sztuk



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent
NANTONG EGENS