

Bactigras, opatrunek parafinowy 5 x 5 cm, 1 sztuka

Cena: 3,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SMITH & NEPHEW
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bactigras to opatrunek wykonany z gazy o specjalnym splocie, nasączony białą miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Działa jako bariera między raną a opatrunkiem wtórnym, umożliwiając przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku zewnętrznego. Chlorheksydyna, stopniowo uwalniana z opatrunku, zapewnia długotrwałe działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Opatrunek jest przeznaczony do stosowania powierzchniowego i zalecany do szerokiego zakresu ran z ryzykiem zakażenia lub zakażonych, w połączeniu z ogólnie stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Wskazania

- Wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu infekcjom zmian skórnych, w tym ran i oparzeń.
- W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia w przypadku ran zagrożonych infekcją takich jak: niewielkie rany oparzeniowe (maksymalnie 10% powierzchni skóry), rany szarpane, otarcia, miejsca pobrania przeszczepu i miejsca dawcze, uszkodzenia popromienne.

Działanie

Opatrunek spełnia rolę bariery pomiędzy raną, a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku wtórnego. Jest to antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy, zawierający chlorheksydynę, która stanowi antyseptyczną barierę, o szerokim spektrum działania.

Skład

Opatrunek BACTIGRAS jest to antyseptyczny, sterylny opatrunek z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną.

Sposób użycia

1. Za pomocą rękawiczek i kleszczyków usunąć papier ochronny.
2. Nałożyć opatrunek bezpośrednio na powierzchnię leczonych zmian, za pomocą kleszczy, w warunkach sterylnych.
3. W razie potrzeby nałożyć dodatkowy opatrunek chłonny i zabezpieczyć go bandażem mocującym.



4. Jeśli opatrunek się klei, delikatnie zmocz go sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
5. Częstotliwość zmiany opatrunku jest uzależniona od warunków klinicznych (średnio: co 2-4 dni).
6. Stosowanie opatrunku Bactigras należy kontynuować do czasu zadowalającego wygojenia rany.

Przeciwwskazania

- Opatrunek może być stosowany na rany nie większe niż 10% powierzchni ciała.
- Nie wolno stosować opatrunku u osób wrażliwych na chlorheksydynę.

Producent

SMITH & NEPHEW
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa