

BACTIGRAS z chlorhexydyną, 10cm x 10cm, 1 sztuka

Cena: 8,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SMITH & NEPHEW
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bactigras to wyrób medyczny stosowany na rany zagrożone infekcją, takie jak niewielkie oparzenia, rany szarpane i otarcia. Działa jako bariera między raną a dodatkowym opatrunkiem, umożliwiając odpływ wydzieliny do zewnętrznego opatrunku wchłaniającego. Antyseptyczny opatrunek z luźno utkanej gazy jest nasączony miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydydy, który działa odkażająco na skórę, błony śluzowe i rany. Chlorheksydydy stopniowo uwalnia się z opatrunku, działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Opatrunek parafinowy Bactigras jest sterylny i przeznaczony do jednorazowego użytku.

Wskazania

- Wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu infekcjom zmian skórnych, w tym ran i oparzeń.
- W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia w przypadku ran zagrożonych infekcją takich jak: niewielkie rany oparzeniowe (maksymalnie 10% powierzchni skóry), rany szarpane, otarcia, miejsca pobrania przeszczepu i miejsca dawcze, uszkodzenia popromienne.

Działanie

Opatrunek spełnia rolę bariery pomiędzy raną, a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku wtórnego. Jest to antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy, zawierający chlorheksydydę, która stanowi antyseptyczną barierę, o szerokim spektrum działania.

Skład

Opatrunek BACTIGRAS jest to antyseptyczny, sterylny opatrunek z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydydą.

Sposób użycia

1. Za pomocą rękawiczek i kleszczyków usunąć papier ochronny.
2. Nałożyć opatrunek bezpośrednio na powierzchnię leczonych zmian, za pomocą kleszczy, w warunkach sterylnych.
3. W razie potrzeby nałożyć dodatkowy opatrunek chłonny i zabezpieczyć go bandażem mocującym.



4. Jeśli opatrunek się klei, delikatnie zmocz go sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
5. Częstotliwość zmiany opatrunku jest uzależniona od warunków klinicznych (średnio: co 2-4 dni).
6. Stosowanie opatrunku Bactigras należy kontynuować do czasu zadowalającego wygojenia rany.

Przeciwwskazania

- Opatrunek może być stosowany na rany nie większe niż 10% powierzchni ciała.
- Nie wolno stosować opatrunku u osób wrażliwych na chlorheksydynę.

Producent

SMITH & NEPHEW
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa