

BD PEN igły, micro-fine plus, rozmiar 0,30 x 8 mm, 100 sztuk

Cena: 20,19 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 sztuk
Postać	Igły
Producent	BECTON-DICKINSON POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

BD Pen Micro-Fine Plus to jednorazowe igły do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN, zaprojektowane dla stabilności i niezawodności podczas iniekcji. Pasują do wstrzykiwaczy wskazanych na etykiecie produktu i wykorzystują nowoczesne technologie, aby zastrzyki były łatwe i komfortowe dla pacjenta.

Przeznaczenie

Igły są jednorazowym, sterylnym wyrobem, wykorzystywanym do podskórnego podawania leku ze zbiornika znajdującego się we wstrzykiwaczu. Są przeznaczone do samodzielnego podawania leku przez pacjenta w warunkach domowych.

Właściwości

Igły Micro Fine Plus są kompatybilne z większością wstrzykiwaczy stosowanych w leczeniu cukrzycy. Daje to poczucie bezpieczeństwa i optymalizuje logistykę. Wyrób ten został opracowany na bazie technologii cienkich ścianek. Oznacza to, że zwiększenie średnicy wewnętrznej igły przy niezmienionej średnicy zewnętrznej umożliwia szybszy przepływ insuliny przy jednoczesnym zmniejszeniu siły niezbędnej do wciśnięcia tłoka wstrzykiwacza. Trójplaszczynowe ostrze pozwala na zmniejszenie odczuwania bólu podczas wkłucia. Igły BD Micro-Fine Plus są poddawane procesowi usuwania drobnych cząstek powstałych w wyniku szlifowania oraz wygładzania powierzchni. Dzięki temu, siła niezbędna do wykonania wkłucia może być mniejsza. Polerowanie igieł zachodzi elektro-chemicznie. Metoda ta pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni, usunięcie pozostałości metalu i ukształtowanie ostrego zakończenia. Igły BD Micro-Fine Plus są pokryte specjalną powłoką. Pokrycie igieł cienką warstwą smaru pozwala zmniejszyć tarcie igły podczas wykonywania wkłucia.

Igły są sterylne, jednorazowe i wolne od lateksu.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykieta.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Nie używać powtórnie.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent

BECTON DIKINSON
Otomańska 14
Warszawa