

Bepanthen Eye Wyrób medyczny krople do oczu 10 ml



Cena: 57,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BEPANTHEN
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Bepanthen Eye wyrób medyczny stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego). Krople skutecznie nawilżają i zapobiegają wysychaniu powierzchni oka. Nie zawierają środków konserwujących i można stosować je wraz z soczewkami kontaktowymi.

Składniki

1 ml zawiera: substancje czynne: hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%; chlorek sodu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, woda do wstrzykiwań.

Zastosowanie

Nawilżanie, zabezpieczanie, ochrona i ukojenie podrażnionych, suchych, zaczerwienionych oczu.

Sposób użycia

- Aplikuj krople raz lub kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb.
- Wkraplaj 1-2 kropli do każdego oka.
- Po zakropleniu mrugnij kilkakrotnie, aby dokładnie rozprowadzić preparat po całej powierzchni oka.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

- Nie używać jeśli pierścień zabezpieczający nasadkę jest uszkodzony lub uszkodzona jest butelka.
- Nie dotykać zakraplaczem oka.
- W bardzo rzadkich przypadkach, stosowanie kropli do oczu może powodować podrażnienia u osób szczególnie wrażliwych.
- Jeśli istnieje konieczność jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści okulistycznych należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy ich podaniem. Bepanthen Eye powinien być zawsze stosowany jako ostatni.
- Nie stosować na zakażone lub zranione oko.
- Po podaniu mogą wystąpić krótkotrwałe zaburzenia ostrości widzenia. Nie należy wtedy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn do czasu powrotu normalnego widzenia.

Producent

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Galeria

