

Biatain Ag Non-Adhesive, 10 cm x 10 cm, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 1 opatrunek



Cena: 20,79 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	COLOPLAST SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Biatain Ag Non-Adhesive to nieprzylepny, miękki i komfortowy opatrunek piankowy zawierający srebro, który wspomaga leczenie zakażonych ran. Jego skuteczna formuła pomaga zwalczać bakterie często występujące w trudno gojących się ranach, przyspieszając proces ich regeneracji i wspierając prawidłowe gojenie. Dzięki wygodnej konstrukcji zapewnia komfort użytkowania i optymalną ochronę.

Działanie

- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą redukować przykry zapach spowodowany obecnością drobnoustrojów w ranie.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag zawierają przeciwbakteryjny kompleks srebra rozproszony równomiernie w piance. Srebro uwalniane jest do łożyska rany po zetknięciu się z wysiękiem. W obecności wysięku uwalnianie jonów srebra będzie następowało przez okres do 7 dni.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag są skuteczne przeciwko szczepom bakteryjnym, o których wiadomo, że wpływają negatywnie na gojenie ran, takim jak *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* i *Streptococcus β-hemolizujący*. In vitro opatrunki wykazują aktywność przeciwbakteryjną do 7 dni.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag są chronione półprzepuszczalnymi osłonami, które są wodoodporne i pełnią rolę barier przeciwbakteryjnych.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag nieprzylepne są za sprawą braku przylepca odpowiednie do stosowania na delikatnej skórze.

Sposób użycia

- Opłukać ranę roztworem soli fizjologicznej lub lekko ciepłą wodą. Delikatnie osuszyć skórę wokół rany. Nie potwierdzono bezpiecznego stosowania opatrunków piankowych Biatain Ag z innymi środkami czyszczącymi.
- W przypadku stosowania filmu, kremu, maści lub podobnego produktu pozostawić skórę do wyschnięcia.
- Wyjąć opatrunki piankowe Biatain Ag z opakowania, stosując się do zasad aseptyki. Nie dotykać czystej (niezadrukowanej) strony pianki.

- Nałożyć opatrunki piankowe Biatain Ag jak przedstawiono na rysunkach i według wskazówek dotyczących nakładania. Wybrać opatrunek, w przypadku którego podkładki piankowe nachodzą co najmniej 2 centymetry na krawędź rany. Zakładka wielkości 1 centymetra jest wystarczająca w przypadku małych opatrunków.
- Jeśli rana wydziela niewielkie ilości wysięku, opatrunki piankowe można przed umieszczeniem na ranie zwilżyć sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek piankowy Biatain Ag nieprzylepny należy zamocować bandażem lub bandażem uciskowym.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag należy zmieniać, kiedy istnieją do tego wskazania kliniczne lub kiedy wysięk widoczny jest na krawędzi opatrunku.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą pozostawać na miejscu do 7 dni w zależności od ilości wysięku, stanu opatrunku i rodzaju rany.
- W przypadku stosowania produktów zawierających srebro przez dłużej niż 30 dni zalecana jest ocena kliniczna przez pracownika służby zdrowia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na srebro.

Producent

ZARYS