

Biatain Ag Non-Adhesive, 10 cm x 20 cm, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 1 opatrunek



Cena: 33,00 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	COLOPLAST SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Biatain Ag Non-Adhesive to miękki, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, który wspomaga leczenie zakażonych ran. Skutecznie zwalcza bakterie obecne w trudno gojących się ranach, przyspieszając proces ich regeneracji. Dzięki komfortowej formule zapewnia wygodę użytkowania.

Działanie

- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą redukować przykry zapach spowodowany obecnością drobnoustrojów w ranie.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag zawierają przeciwbakteryjny kompleks srebra rozproszony równomiernie w piance. Srebro uwalniane jest do łożyska rany po zetknięciu się z wysiękiem. W obecności wysięku uwalnianie jonów srebra będzie następowało przez okres do 7 dni.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag są skuteczne przeciwko szczepom bakteryjnym, o których wiadomo, że wpływają negatywnie na gojenie ran, takim jak *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* i *Streptococcus β-hemolizujący*. In vitro opatrunki wykazują aktywność przeciwbakteryjną do 7 dni.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag są chronione półprzepuszczalnymi osłonami, które są wodoodporne i pełnią rolę barier przeciwbakteryjnych.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag nieprzylepne są za sprawą braku przylepca odpowiednie do stosowania na delikatnej skórze.

Sposób użycia

- Opłukać ranę roztworem soli fizjologicznej lub lekko ciepłą wodą. Delikatnie osuszyć skórę wokół rany. Nie potwierdzono bezpiecznego stosowania opatrunków piankowych Biatain Ag z innymi środkami czyszczącymi.
- W przypadku stosowania filmu, kremu, maści lub podobnego produktu pozostawić skórę do wyschnięcia.
- Wyjąć opatrunki piankowe Biatain Ag z opakowania, stosując się do zasad aseptyki. Nie dotykać czystej (niezadrukowanej) strony pianki.

- Nałożyć opatrunki piankowe Biatain Ag jak przedstawiono na rysunkach i według wskazówek dotyczących nakładania. Wybrać opatrunek, w przypadku którego podkładki piankowe nachodzą co najmniej 2 centymetry na krawędź rany. Zakładka wielkości 1 centymetra jest wystarczająca w przypadku małych opatrunków.
- Jeśli rana wydziela niewielkie ilości wysięku, opatrunki piankowe można przed umieszczeniem na ranie zwilżyć sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek piankowy Biatain Ag nieprzylepny należy zamocować bandażem lub bandażem uciskowym.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag należy zmieniać, kiedy istnieją do tego wskazania kliniczne lub kiedy wysięk widoczny jest na krawędzi opatrunku.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą pozostawać na miejscu do 7 dni w zależności od ilości wysięku, stanu opatrunku i rodzaju rany.
- W przypadku stosowania produktów zawierających srebro przez dłużej niż 30 dni zalecana jest ocena kliniczna przez pracownika służby zdrowia.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Ponowne użycie tego produktu jednorazowego użytku może stanowić potencjalne ryzyko dla użytkownika. Przetwarzanie, czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei powoduje dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.
- Środki ostrożności
- Pracownik służby zdrowia powinien często sprawdzać rany cukrzycowe oraz rany, które są częściowo lub wyłącznie spowodowane przez niewydolność tętniczą, oraz postępować z nimi zgodnie z miejscowymi standardami.
- Opatrunków piankowych Biatain Ag nie należy stosować u pacjentów ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na srebro.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy skontaktować się z firmą Coloplast, aby uzyskać dalsze informacje.
- Opatrunków piankowych Biatain Ag nie wolno stosować z roztworami utleniającymi, np. roztworami podchlorynu i nadtlenku wodoru. Przed założeniem opatrunku należy się upewnić, że wszystkie parujące roztwory całkowicie wyschły.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą spowodować przemijające odbarwienie łożyska rany, co można usunąć za pomocą delikatnego mycia.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag należy zdejmować przed radioterapią lub badaniami związanymi z zastosowaniem promieni RTG, ultradźwięków, diatermii lub mikrofal.
- Opatrunki piankowe są bezpieczne do stosowania podczas MR i zgodne z MR do 3 Tesli, dlatego nie ma konieczności ich zdejmowania podczas badania MR (Tesla: jednostka siły pola magnetycznego).
- Nie badano stosowania opatrunków piankowych Biatain Ag w okresie ciąży, karmienia piersią ani u dzieci.
- Nie badano zakładania opatrunków piankowych Biatain Ag z enzymatycznymi środkami oczyszczającymi.
- Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Producent
COLOPLAST