

Biatain Ag, opatrunek piankowy nieprzylepny, 15 cm x 15 cm, 1 sztuka



Cena: 38,01 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	COLOPLAST SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne, Ochronne, Regenerujące, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Opatrunki Biatain Ag to jednorazowe, sterylne pianki poliuretanowe, które są miękkie, elastyczne i bardzo chłonne. Dzięki zawartości jonów srebra wykazują działanie przeciwbakteryjne. Ich zastosowanie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego, wilgotnego środowiska wspomagającego gojenie się ran oraz skuteczne zarządzanie wysiękiem.

Wskazania

- Opatrunki piankowe Biatain Ag są wskazane w szerokim zakresie ran sączących, w tym owrzodzeń goleni i odleżyn, które goją się z opóźnieniem w wyniku obecności bakterii lub tam, gdzie istnieje ryzyko zakażenia.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag można stosować w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia, miejsc pobrania przeszczepu skóry, ran pooperacyjnych i otarć skóry, gdzie gojenie jest opóźnione w wyniku obecności bakterii, lub tam, gdzie istnieje ryzyko zakażenia.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag nieprzylepne są także wskazane w przypadku wrzodów w przebiegu stopy cukrzycowej.

-Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą redukować przykry zapach spowodowany obecnością drobnoustrojów w ranie.

- Opatrunki piankowe Biatain Ag można stosować u pacjentów z zakażeniami miejscowymi i ogólnymi według uznania pracownika służby zdrowia.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag można stosować w całym okresie gojenia, aby zapewnić ochronę dla wszystkich rodzajów ran wymienionych we wskazaniach.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag nadają się do stosowania w połączeniu z leczeniem uciskiem.

Działanie

- Stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz,
- Półprzepuszczalny dla pary wodnej,
- Wodoodporny,
- Kompleks srebra jest równomiernie rozmieszczony w piance,
- Bakterie zostają otoczone jonami srebra,
- Zapewnia absorpcję bakterii żywych i martwych

Sposób użycia

- Oplukać ranę roztworem soli fizjologicznej lub lekko ciepłą wodą. Delikatnie osuszyć skórę wokół rany. Nie potwierdzono bezpiecznego stosowania opatrunków piankowych Biatain Ag z innymi środkami czyszczącymi.
- W przypadku stosowania filmu, kremu, maści lub podobnego produktu pozostawić skórę do wyschnięcia.
- Wyjąć opatrunki piankowe Biatain Ag z opakowania, stosując się do zasad aseptyki. Nie dotykać czystej (niezadrukowanej) strony pianki.
- Nałożyć opatrunki piankowe Biatain Ag jak przedstawiono na rysunkach i według wskazówek dotyczących nakładania. Wybrać opatrunek, w przypadku którego podkładki piankowe nachodzą co najmniej 2 centymetry na krawędź rany. Zakładka wielkości 1 centymetra jest wystarczająca w przypadku małych opatrunków.
- Jeśli rana wydziela niewielkie ilości wysięku, opatrunki piankowe można przed umieszczeniem na ranie zwilżyć sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek piankowy Biatain Ag nieprzylepny należy zamocować bandażem lub bandażem uciskowym.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag należy zmieniać, kiedy istnieją do tego wskazania kliniczne lub kiedy wysięk widoczny jest na krawędzi opatrunku.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą pozostawać na miejscu do 7 dni w zależności od ilości wysięku, stanu opatrunku i rodzaju rany.
- W przypadku stosowania produktów zawierających srebro przez dłużej niż 30 dni zalecana jest ocena kliniczna przez pracownika służby zdrowia.

Ostrzeżenia

- Ponowne użycie tego produktu jednorazowego użytku może stanowić potencjalne ryzyko dla użytkownika. Przetwarzanie, czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei powoduje dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.
- Pracownik służby zdrowia powinien często sprawdzać rany cukrzycowe oraz rany, które są częściowo lub wyłącznie spowodowane przez niewydolność tętniczą oraz postępować z nimi zgodnie z miejscowymi standardami.
- Opatrunków piankowych Biatain Ag nie należy stosować u pacjentów ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na srebro.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy skontaktować się z firmą Cotoplast, aby uzyskać dalsze informacje.
- Opatrunków piankowych Biatain Ag nie wolno stosować z roztworami utleniającymi, np. roztworami podchlorynu i nadtlenku wodoru. Przed założeniem opatrunku należy się upewnić, że wszystkie parujące roztwory całkowicie wyschły.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag mogą spowodować przemijające odbarwienie łożyska rany, co można usunąć za pomocą delikatnego mycia.
- Opatrunki piankowe Biatain Ag należy zdejmować przed radioterapią lub badaniami związanymi z zastosowaniem promieni RTG, ultradźwięków, diatermii lub mikrofal.
- Opatrunki piankowe są bezpieczne do stosowania podczas MR i zgodne z MR do 3 Tesli, dlatego nie ma konieczności ich zdejmowania podczas badania MR (Tesla: jednostka siły pola magnetycznego).
- Nie badano stosowania opatrunków piankowych Biatain Ag w okresie ciąży, karmienia piersią ani u dzieci.

Producent

Coloplast Sp. z o.o.
Inflancka 4
00-189 Warszawa