

# BioleVox HA One 2,5%, 4,8 ml, żel dostawowy, 1 ampułko-strzykawka

Cena: 978,73 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn       |
| Opakowanie      | 1 ampułko-strzykawka po 4,8 ml |
| Postać          | żel dostawowy                  |
| Producent       | BIOVICO SP. Z O.O.             |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe                  |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                 |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów    |

## Opis produktu

### Opis

**Biolevox HA ONE** to sterylny, apirogenny wyrób medyczny zawierający hialuronian sodu o wysokiej masie cząsteczkowej. Jest stosowany do iniekcji dostawowej w celu poprawy lepkości mazi stawowej. Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

### Wskazania

Preparat jest wskazany przy dolegliwościach bólowych oraz ograniczeniach ruchomości stawów, będących wynikiem zmian zwyrodnieniowych (osteoartrozy) bądź po urazach.

### Działanie

Zawarty w preparacie hialuronian sodu jest substancją odpowiedzialną za lepkość i elastyczność mazi stawowej. Poprzez swoje właściwości smarujące i amortyzujące wpływa na bezbolesny, fizjologiczny ruch stawu. Ponadto, dostarcza on chrząstce stawowej substancji odżywczych. Wstrzyknięcie dostawowe hialuronianu sodu pozwala uelastyczyć i poprawić lepkość mazi stawowej. Dzięki temu, już jedna iniekcja dostawowa pozwala poprawić ruchomość w stawie, przywrócić komfort oraz zmniejszyć poziom odczuwalnego bólu, wynikającego z uszkodzenia chrząstki stawowej.

### Skład

1 ml preparatu zawiera: hialuronian sodu (25,000 mg), chlorek sodu (6,500 mg), dwusodowy wodorofosforan (0,563 mg), sodowy dwuwodorofosforan (0,045 mg), woda do iniekcji (q.s.).

### Przeznaczenie

Produkt Biolevox HA ONE przeznaczony jest do iniekcji dostawowej, celem zwiększenia lepkości mazi stawowej.

### Sposób użycia

- Należy zdezynfekować skórę w miejscu planowanej iniekcji.
- Wyjąć ampułko-strzykawkę z opakowania, pozbyć się zacisku Luer-lock ze strzykawki i nałożyć na nią igłę dołączoną do opakowania.
- Przed wykonaniem iniekcji usnąć pęcherzyki powietrza, o ile takowe powstały.

#### **Przeciwwskazania**

Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których stwierdzono:

- nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu
- septyczne zapalenie stawów
- dermatozę w miejscu planowanej iniekcji
- a także u pacjentów, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe

#### **Uwagi**

- Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności w trakcie zabiegu, celem zapobieżenia ryzyka wystąpienia septycznego zapalenia stawów.
- Wyrób jest przeznaczony jedynie do stosowania jako iniekcja dostawowa.
- Podczas dezynfekcji skóry przed planowaną iniekcją, nie stosować środków, które zawierają w swym składzie czwartorzędowe sole aminowe, gdyż może to spowodować wytrącenie hialuronianu sodu.
- Z uwagi na brak wystarczających danych, wyrób nie powinien być stosowany przez dzieci oraz kobiety ciężarne bądź karmiące.

#### **Producent**

Biovico Sp. z o.o.  
ul. Hutnicza 15 B  
81-061 Gdynia