

Biolevox HA Tendon 2 ml, 1 ampułkostrzykawka

Cena: 370,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BIOLEVOX
Opakowanie	1 ampułko-strzykawka po 2 ml
Postać	żel dostawowy
Producent	BIOVICO SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Stawy, Urazy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Biolevox HA Tendon to medyczny żel dostawowy zawierający hialuronian sodu. Jest przeznaczony do iniekcji dostawowej, aby poprawić lepkość mazi stawowej.

Wskazania

Dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchomości w chorobach ścięgien powstałe w wyniku urazów (np. naciągnięcia ścięgna) lub zmian przeciążeniowych (np. łokieć tenisisty, tendinopatia stożka rotatorów).

Działanie

Hialuronian sodu zawarty w Biolevox HA Tendon zwiększa poziom hialuronianu sodu naturalnie występującego w tkankach miękkich otaczających ścięgna, przez co zapewnia wzmocnienie i nawilżenie miejsca dotkniętego urazem lub przeciążeniem, tworząc tym samym doskonałe środowisko dla regeneracji. Dzięki swojemu działaniu łagodzi dolegliwości bólowe oraz ogranicza ruchomości, powstałe w wyniku urazów lub przeciążeń w obrębie ścięgien.

Składniki

1 ml zawiera:

- Hialuronian sodu 16,000 mg
- Chlorek sodu 8,500 mg
- Dwusodowy wodorofosforan 0,563 mg
- Sodowy dwuwodorofosforan 0,045 mg
- Woda d iniekcji q.s.

Przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów:

- Ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu
- Z septyczny, zapaleniem stawów
- Z dermatozą w miejscu planowania iniekcji
- Przyjmujących leki przeciwzakrzepowe
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy stosować produktu w przypadku kiedy seryljan ampułkostrzykawka jest uszkodzona.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności podczas przeprowadzania zabiegu w celu zapobiegania wystąpienia septycznego zapalenia ścięgien.
- Wyrób przeznaczony jest do iniekcji wokół chorego ścięgna lub do pochewki chorego ścięgna.
- Do dezynfekcji skóry, przed iniekcją, nie stosować środków zawierających czwartorzędowe sole amoniowe, ponieważ w ich obecności Hialuronian sodu może ulec wytrąceniu.
- Produkt nie może być ponownie sterylizowany.
- Ampułkostrzykawka przeznaczona jest do stosowania u jednego pacjenta w jednym czasie aplikacji.

Producent

Biovico Sp. z o.o.
Hutnicza 15B
81-061 Gdynia