

Biotrue, płyn do soczewek, 300 ml

Cena: 41,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	300 ml
Postać	Płyn
Producent	BAUSCH & LOMB POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	, Dezynfekujące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Biotrue to wielofunkcyjny płyn do codziennej pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych. Produkt zapewnia nawilżenie, oczyszczanie, płukanie, dezynfekcję oraz usuwanie osadów białkowych z soczewek.

Skład

Hialuronian, sulfobetaina, poloksamina, kwas borowy, boran sodu, sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, chlorek sodu; konserwowany 0,00013% roztworem biguanidu poliaminopropylowy oraz 0,0001% polyquaternium.

Przeznaczenie

Do pielęgnacji, oczyszczania, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania i przechowywania soczewek kontaktowych.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy dokładnie umyć dłonie.
- Zdjąć soczewkę z oka, następnie położyć ją na dłoni i polać kilkoma kroplami płynu, a następnie pocierać przez kilka sekund po obu stronach.
- Powtórzyć czynność dla drugiej soczewki.
- Wyczyszczone w ten sposób soczewki dodatkowo należy przepłukać świeżym płynem pielęgnacyjnym.
- Na koniec umieścić w pojemniku na soczewki i zalać nową porcją płynu tak, aby były przykryte i pozostawić na czas określony przez producenta płynu.

Uwagi

- Za każdym razem należy wylać z pojemnika zużyty płyn.
- Zawsze należy dokładnie zakręcać butelkę z płynem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

BAUSCH & LOMB INCORPORATED