

Canpol, osłonki na piersi Eeasy start rozmiar S, 2 sztuki.

Cena: 56,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	2 sztuki
Postać	Osłonki na piersi
Producent	CANPOL SP. Z O.O. SKA
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Osłonki na piersi wykonane z miękkiego i delikatnego silikonu zapewniają komfortowe karmienie bez bólu. Skutecznie chronią wrażliwe, podrażnione brodawki i wspomagają ich regenerację. Dzięki zwężonej górnej krawędzi dziecko może swobodnie przylgnąć do piersi matki, odczuwając jej naturalny zapach i ciepło. Silikon jest neutralny pod względem smaku i zapachu, co nie zmienia właściwości pokarmu. Osłonki umieszczone w praktycznym plastikowym etui pozwalają na łatwe utrzymanie higieny. W zestawie znajdują się dwie sztuki.

Zastosowanie

Opakowanie zawiera 2 nakładki w rozmiarze S

Sposób użycia

- Produkt utrzymuj w czystości.
- Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj osłonki delikatnym płynem i dokładnie wypłucz.
- Dezynfekuj je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty.
- Osłonki nie nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalach.
- Można je dezynfekować w gorącej wodzie i sterylizatorze.
- Osłonkę nakładaj na suchą i czystą pierś.
- Nie stosuj żadnych kremów i wazelin.
- Nie dziurkuj ani nie powiększaj otworów osłonki, gdyż może to spowodować jej rozpad lub zniszczenie.
- Przed zastosowaniem produktu zalecamy konsultację z doradcą laktacyjnym lub położną.
- Przed założeniem osłonki delikatnie pomasuj brodawkę, aby ją wyciągnąć.
- Następnie przyłóż osłonkę do piersi tak, aby sutek wypełniał otwór i dokładnie dociśnij ją do piersi.
- Upewnij się, że część wyprofilowana skierowana jest ku górze lub miejscu gdzie podczas karmienia znajduje się noszek dziecka
- Delikatnie przytrzymując osłonkę możesz rozpocząć karmienie.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

CANPOL