

CICHO wSZA Wyczeska, grzebień do włosów, 1 sztuka



Cena: 56,87 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SANITY
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Grzebień
Producent	SMEDICAL HEALTH & BEAUTY, S.L.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka

Opis produktu

Opis

CICHO wSZA Wyczeska to medyczny grzebyk, który stanowi praktyczne uzupełnienie serii produktów CICHO wSZA. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia bezpieczne i skuteczne usuwanie wszy oraz gniid z włosów.

Stosowanie

Włosy należy przeczesywać partiami. Po przeczesaniu każdego pasma należy opłukać grzebień w misce z wodą. Po wyczesaniu całej głowy należy zanurzyć grzebień na kilka minut (co najmniej 5-10) we wrzącej wodzie.

Sposób użycia

- Umyć włosy (np. szamponem CICHO wSZA)
- Osuszyć je ręcznikiem i podzielić na mniejsze pasemka.
- Wyczesać włosy ostrożnie pasmo po paśmie grzebieniem CICHO wSZA od skóry głowy do końcówek włosów.
- Płukać grzebień po każdym przeczesaniu pasma włosów.
- Osuszyć wyczeskę papierowym ręcznikiem, upewniając się, że usunięte zostaną wszystkie wszy lub gniidy przymocowane do grzebienia.
- Po dokładnym wyczesaniu zalecamy ponowne umycie włosów. Można użyć w tym celu szamponu CICHO wSZA, aby wzmocnić efekt działania.
- Sprawdzamy ponownie już wysuszone włosy. Jeśli nadal widzimy na włosach wszy lub gniidy, powtarzamy czynności.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykiety.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce
albertpolska@albert.com.pl