

ClinSin med, zestaw do płukania nosa i zatok, 16 saszetek + irygator



Cena: 38,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka + 16 saszetek
Postać	Zestaw
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

ClinSin med to wyrób medyczny przeznaczony do płukania nosa i zatok, przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 lat oraz dorosłych.

Skład

1 saszетка zawiera chlorek sodu w ilości 2,16 g.

Stosowanie

Zatoki płukać 1-2 razy dziennie. Należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy płukaniem, a wyjściem na dwór (przy temperaturze poniżej 19°C) lub pójściem spać.

Przeznaczenie

Produkt do stosowania w pielęgnacji i oczyszczaniu nosa i zatok w przypadku zapalenia zatok przynosowych, nieżytów nosa różnego pochodzenia, wysokiego zapylenia lub przesuszenia powietrza, a także wysuszenia śluzówki po stosowaniu leków do nosa. Zalecany jest również przy objawach pooperacyjnych nosa i zatok oraz w celach profilaktycznych.

Sposób użycia

W zależności od rodzaju pożądanego roztworu wsyp zawartość 1 saszетки (roztwór izotoniczny) lub zawartość 2 saszetek (roztwór hipertoniczny) i zalej ciepłą, przegotowaną wodą do poziomu oznaczonego linią 240 ml. Zakryj otwór w nakrętce za pomocą palca i dokładnie wymieszaj zawartość, aż do uzyskania klarownego roztworu. Nachyl się nad umywalką bądź miską, przyłóż końcówkę irygatora do jednej dziurki nosa. Oddychając przez usta ściśnij butelkę, tak aby połowa roztworu dostała się do nosa - wypłynie on wraz z wydzielinami drugą dziurką, więc nie należy jej uciskać. Płukanie powtórzyć z drugą dziurką nosową. Oczyszczyć nos poprzez wydychanie w czystą chusteczkę. Pozostały w irygatorze roztwór wylej.

Zarówno przed, jak i po każdym użyciu należy dokładnie umyć zestaw.

Przeciwwskazania



- Nie należy stosować zestawu ClinSin w przypadku całkowitej blokady nosa, krzywej przegrody nosowej oraz infekcji ucha.
- W przypadku operacji ucha przed użyciem należy poradzić się lekarza.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.
- Płukanie przeprowadzać przy użyciu ciepłej, przegotowanej wody, nigdy gorącej.
- Nie połykać roztworu.
- Nie stosować irygatora dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

Uwagi

- Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Butelkę przechowywać z odkręconą nakrętką.
- Jeśli irygator ulegnie pęknięciu, zadrapaniu lub przebarwieniu, należy wymienić go na nowy.
- Nie sterylizować poprzez gotowanie.

Producent

NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka