

ClinSin Med, zestaw uzupełniający, 30 saszetek



Cena: 18,73 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

ClinSin Med (30 saszetek) to leczniczy wyrób medyczny w formie proszku do sporządzania roztworu, używany do płukania jamy nosowej i zatok. Jest zalecany przy zapaleniu zatok, nieżytach nosa różnego pochodzenia oraz po zabiegach chirurgicznych. ClinSin Med jest odpowiedni dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Produkt stanowi zestaw uzupełniający do specjalnej butelki ClinSin Med, dostępnej w sprzedaży z 16 saszetkami preparatu.

Składniki

Chlorek sodu (2,16 g w każdej saszetce).

Zastosowanie

Wyrób medyczny ClinSin Med 30 saszetek stosuje się w:

- zapaleniach zatok przynosowych,
- nieżytach nosa (różnego pochodzenia, np. alergie lub infekcje),
- płukaniu nosa przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,
- sytuacjach wysokiego zapylenia powietrza lub nadmiernej suchości powietrza,
- przypadku wysuszenia śluzówki nosa w wyniku stosowania leków aplikowanych do nosa,
- celu utrzymania właściwej higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

- Przed przygotowaniem roztworu upewnij się, że irygator jest czysty.
- Aby otrzymać roztwór izotoniczny, wsyp do irygatora zawartość 1 saszetki preparatu.
- Aby otrzymać roztwór hipertoniczny, wsyp do irygatora zawartość 2 saszetek preparatu.
- Uzupełnij irygator do linii 240 ml przegotowaną, ciepłą (ale nie gorącą) wodą, po czym zamknij irygator nakrętką.
- Zakryj palcem otwór w nakrętce irygatora i wymieszaj całość, potrząsając aż do uzyskania klarownego roztworu.

- Nachyl się nad umywalką, lub miską i oddychaj swobodnie przez usta.
- Przyłóż końcówkę nakrętki irygatora do otworu nosowego.
- Ściśnij butelkę płynnym ruchem, wprowadzając do jamy nosowej połowę przygotowanego roztworu. Nie uciskaj drugiego otworu nosowego, by roztwór i wydzielina mogły nim swobodnie wypłynąć.
- Powtórz te same czynności z drugim otworem nosowym.
- Nie połykaj roztworu.
- Oczyszć oba otwory nosowe, delikatnie wydmuchując nos w chusteczkę.
- Wylej pozostałości roztworu i dokładnie umyj irygator wraz z zakrętką.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować preparatu ClinSin Med (30 saszetek) w przypadku nadwrażliwości na jego substancję czynną.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować do płukania wody gorącej lub nieprzegotowanej z kranu.
- Nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu produktu.

Ważne wskazówki

- Do płukania używaj tylko oryginalnego irygatora ClinSin Med.
- Do płukania używaj wyłącznie świeżo przygotowanego roztworu.
- Po przebyciu operacji uszu lub nosa, przed użyciem zestawu ClinSin Med należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania, ponieważ zawiera ona ważne informacje o prawidłowym stosowaniu preparatu.
- Należy zachować instrukcję użytkowania produktu, by w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania preparatu ClinSin Med należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka