

Clisma Lax lewatywa wypróżniająca (enema), wlewka doodbytnicza, 133 ml



Cena: 15,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	133 ml
Postać	Wlewka
Producent	AVEC PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Clisma Lax to doodbytnicza wlewka oparta na soli fizjologicznej, pełniąca funkcję środka przeczyszczającego. Jej działanie polega na wywoływaniu efektu osmotycznego w jelicie grubym, co skutkuje napływem wody do jego wnętrza, rozciągnięciem ścian jelita oraz stymulacją jego perystaltyki, co ostatecznie prowadzi do jego oczyszczenia.

Wskazania

- Przy zaparciach oraz do oczyszczania jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, radiologicznymi, urologicznymi, ginekologicznymi i kolonoskopowymi.
- Wlewka doodbytnicza jest prosta i bezpieczna w użyciu. Doskonale sprawdzi się przed zabiegami operacyjnymi i porodem.
- Produkt nie wymaga montażu ani dodatkowych akcesoriów, a wygodna w użyciu końcówka pokryta jest żelem nawilżającym.

Skład

Butelka 133 ml zawiera roztwór w przeliczeniu na 100 ml: diwodoroortofosforan sodu (NaH_2PO_4) 13,91 g; wodoroortofosforan sodu (Na_2HPO_4) 3,18 g; wodorotlenek sodu; benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan metylu, woda destylowana w ilości dopełniającej do 100 ml.

Sposób użycia

- Zdejmij nasadkę ochronną z kaniuli doodbytniczej;
- Chwyć butelkę i delikatnie wprowadź kaniulę do odbytnicy w kierunku pępka, a następnie wyciśnij ją do końca. Niewielka część płynu może pozostać w butelce.
- U dzieci: kaniulę wprowadzić do maksymalnie połowy jej długości;
- Po wyciśnięciu płynu wyjmij kaniulę, umieść pustą butelkę w tym samym kartoniku i wyrzuć.

- Pozostań w pozycji leżącej przez około 5 minut, do chwili odczucia potrzeby wypróżnienia;
- Nie ma potrzeby przetrzymywania lewatywy dłużej niż 5 minut. Nawet przy braku parcia na stolec należy podjąć próbę wypróżnienia, ponieważ podany roztwór powinien być wydalony w możliwie jak najkrótszym czasie.

Przeciwwskazania

- Clismalax jest przeciwwskazany u pacjentów dializowanych.
- Przeciwwskazaniem są także zaburzenia, które mogą przedłużyć czas przebywania roztworu w jelicie, takie jak: rozdęcie okrężnicy (megacolon), niedrożność lub zwężenie jelit, kamienie kałowe.
- Clismalax jest również przeciwwskazany w hemoroidach, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych jelit oraz w przypadku występowania nudności, wymiotów i bólu brzucha.

Producent

AVEC Pharma Sp. z o.o.,
Beżowa 2,
54-046 Wrocław

Galeria

