

Compeed dyskretny plaster na opryszczkę, 15 sztuk



Cena: 49,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	15 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opryszczka
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Compeed to dyskretny plaster na opryszczkę, będący wyrobem medycznym, który zawiera aktywny żel hydrokoloidowy wspomagający szybsze gojenie i zapobieganie powstawaniu strupów. Zapewnia on optymalne środowisko do leczenia.

Działanie

Plaster tworzy w miejscu przyklejenia optymalne środowisko do leczenia opryszczki na ustach. Pozostaje na miejscu przez 12 godzin (czas ten może się różnić w indywidualnych przypadkach). Zmniejsza także ryzyko zakażenia opryszczką. Działa od najwcześniejszego objawu i na wszystkich kolejnych etapach, aby pomóc powstrzymać nasilenie się objawów opryszczki.

Skład

Plastry hydrokoloidowe

Stosowanie

Plastry stosować zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Terapię należy rozpocząć gdy pojawi się pierwsze uczucie mrowienia lub swędzenia ust i kontynuować aż do całkowitego wyleczenia zmian. Plastry na opryszczkę Compeed należy nosić przez 24 godziny, zmieniać co około 12 godzin po samoczynnym odklejeniu się plastra.

Przeznaczenie

Plaster przeznaczony dla osób dorosłych.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyj i osusz ręce. W miejscu przyklejenia plastra nie należy nanosić kremów, gdyż może nie utrzymać się na tłustej skórze.
2. Wyjąć aplikator z plasterem, odstąpić warstwę klejącą plastra poprzez pociągnięcie jednej części końcówki aplikatora. Nie dotykać części klejącej palcami.
3. Delikatnie docisnąć plaster do miejsca wystąpienia opryszczki.
4. Wolnym, płynnym ruchem odkleić drugi koniec aplikatora i docisnąć plaster do skóry.



5. Wedle upodobań na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.
6. Plaster można nosić aż do momentu, w którym sam zacznie się odklejać.

Właściwości

Plastry posiadają ultracienką warstwę żelu hydrokoloid 075 pochłaniającego nadmiar płynu, przyczynia się do szybkiego gojenia, zapewnia optymalne, wilgotne środowisko oraz zapobiega tworzeniu się strupów. Dzięki półprzepuszczalnej membranie pozwala ranie oddychać, jednocześnie chroniąc ją przed zewnętrznymi czynnikami zanieczyszczającymi, takimi jak brud i bakterie. Bariera ochronna, zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi, ogranicza ryzyko zakażenia i nasilanie się objawów. Plastry elastycznie dopasowują się do ruchów i pozostają na miejscu do 12 godzin, dzięki swojej ultraprzyklepności i wymodelowanym krawędziom. Przezroczysty plaster nie odznacza się na skórze i zapewnia maksymalną dyskrecję.

Ostrzeżenia

Jeśli opryszczka jest bolesna lub utrzymuje się przez dłuższy okres czasu należy skonsultować się z lekarzem. Wyrób jednorazowego użytku. Nie stosować na rany zakażone, inne niż opryszczka. Osoby z cukrzycą lub zaburzeniami odporności powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Pod plastrem nie wolno stosować innych preparatów na opryszczkę do nakładania miejscowego

Nie dotykać zmienionego miejsca w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się wirusa na inne części ciała albo na inne osoby. W przypadku dotknięcia opryszczki natychmiast umyć ręce. W trakcie wystąpienia opryszczki nie dotykać ani nie pocierać rękami oczu. Nie korzystać ze wspólnych naczyń czy szklanek, szminek, szczoteczek czy nawet ręczników. Zawsze przechowywać plastry w pudełku.

Uwagi

Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować na miejsca posmarowane kremem. Plaster pozostawić do czasu, aż sam zacznie odklejać się od skóry. Dla uzyskania najlepszych rezultatów plaster należy zastosować od razu, jak tylko pojawią się pierwsze objawy opryszczki, takie jak uczucie mrowienia, swędzenia i pieczenia. Stosować plastry nieprzerwanie w ciągu dnia i nocy aż do całkowitego wyleczenia zmian opryszczkowych. Skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, jeśli opryszczka jest bolesna i/lub nie udało się jej wyleczyć w ciągu 20 dni. Nie używać ponownie. Aby uniknąć zarażenia, po użyciu plaster należy wyrzucić do kosza. Można jeść i pić podczas noszenia plastra.

Producent

LABORATOIRE HRA PHARMA
200 avenue de Paris
92320 Châtillon, France

Galeria

Opryszczka Plasty MAT-11765

Poczuj ochronę już przy pierwszym mrowieniu

Leczy, ukrywa i chroni opryszczkę, jednocześnie pomagając zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Compeed® Dyskretny plaster i Dyskretna opryszczka nie są produktami. Produkt promowany w reklamie: Plaster i Plasterka Do z... Producent: Laboratoire H&M Pharma

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Działa jak tarcza ochronna przed wirusem MAT-11765

Przyspiesza gojenie*

- Dyskretny plaster
- Do 12 godzin nieprzerwanego działania
- Chroni przed drobnoustrojami

Compeed
LECZENIE OPRYSZCZKI
DYSKRETNIE
15

* w porównaniu do naturalnego procesu gojenia

Skuteczna ochrona dzień i noc MAT-11765

Przy pierwszym mrowieniu
Nałóż jak najwcześniej, aby powstrzymać rozwój opryszczki.

Całodzienna ochrona
Stawaj w szkodę w pracy - nawet pod makijażem

Nocne działanie
Plaster wspomaga gojenie i chroni także podczas snu.

Compeed

Łatwy w aplikacji MAT-11765

1. Umyj ręce i oczyść usta z wszelkich produktów.
2. Ostrożnie oderwij aplikator.
3. Umieść plaster nad opryszczką, używając lusterka.
4. Delikatnie dociśnij, aby dobrze przylegał.
5. Usun aplikator.

Plaster utrzymuje się do 12 godzin - jeśli chcesz, możesz nałożyć makijaż.

Compeed

Compeed®
Ratuje dzień! MAT-11765

Pęcherze

Odciski i zrogowacenia

Halluksy

Opryszczka