

# Compeed Wyrób medyczny dyskretny plaster leczniczy leczenie opryszczki 15 sztuk



Cena: 39,41 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	15 szt.
Postać	-
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

nowy aplikator, nieprzerwane działanie aż do 12h, szybko leczy, działa jak tarcza antywirusowa

### Składniki

plastry hydrokoloidowe

### Stosowanie

Sposób użycia:

Plaster na opryszczkę można stosować na każdym etapie rozwoju wykwitu. Najlepiej jest przykleić plaster po wystąpieniu pierwszego objawu wskazującego na zbliżający się wykwit opryszczki - zwykle jest to uczucie mrowienia lub swędzenie.

Jak nałożyć plaster:

1. Umyć ręce przed i po użyciu. Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Nie nakładać kremu na wargę, ponieważ może to uniemożliwić przyklejenie plastra. Oderwać jeden plaster wzdłuż perforowanej krawędzi i oddzielić go od pozostałych.
2. Przytrzymać przezroczysty papierowy aplikator za zakrzywioną krawędź.
3. Używając obu dłoni, oderwać przezroczysty papierowy aplikator od zielono-niebieskiej osłony zabezpieczającej.
4. W górnej części aplikatora widoczny będzie okrągły plaster na opryszczkę. Uważać, aby nie dotykać klejącej strony plastra.
5. Nałożyć tę część aplikatora na opryszczkę, korzystając jednocześnie z lusterka i delikatnie przycisnąć, aby mocno umieścić plaster na opryszczce.
6. Delikatnie oderwać spodnią stronę aplikatora, pozostawiając plaster na miejscu. Na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

### Opis

Compeed Wyrób medyczny dyskretny plaster leczniczy leczenie opryszczki 15 sztuk