

# Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski między palcami 10 sztuk



Cena: 26,21 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	, Odciski
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Wskazania

chronią przed uciskiem i otarciami, natychmiastowo uśmierza ból, pozostaje na miejscu

### Składniki

plastry hydrokolooidowe

### Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na odciski między palcami?

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków.
2. Usunąć górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotyku warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster tak, aby osadzony w nim dysk znajdował się centralnie na odcisku. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni.
5. Dla najlepszych rezultatów stosuj Compeed do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

### Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski między palcami 10 sztuk