

Compeed Wyrób medyczny plastry na zwyrodnienia kostne halluksy średnie 5 sztuk



Cena: 28,70 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	5 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Halluksy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Wskazania

natychmiastowa ulga w ucisku i ocieraniu, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolooidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na zwyrodnienia kostne (halluksy)?

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Obszar, na którym znajduje się pęcherz, nie może być tłusty od kremów czy olejków.
2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: Plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni). Aby usunąć plaster: Nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na zwyrodnienia kostne halluksy średnie 5 sztuk