

Controlly Basic, nebulizator tłokowy, 1 sztuka



Cena: 14,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Controlly Basic to tłokowy nebulizator medyczny, zaprojektowany do wygodnego prowadzenia inhalacji w warunkach domowych. Umożliwia skuteczne dostarczanie cząsteczek leku do dróg oddechowych i płuc. Dzięki swojej prostej obsłudze i niewielkiej wadze jest łatwy w użyciu oraz wygodny do transportu. Odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Działanie

Produkt dzięki jednocylindrowej pompie tłokowej wytwarza strumień powietrza pod ciśnieniem, który przekształca roztwór leczniczy w mgiełkę cząsteczek o wielkości MMAD 2,44 µm. Umożliwia to przedostanie się leku do dróg oddechowych i jego przenikanie do miejsc zapalnych.

Sposób użycia

1. Podłącz kompresor do prądu, sprawdź czy filtr powietrza znajduje się na swoim miejscu i włącz urządzenie.
2. Po 1-2 minutach prawidłowej pracy kompresora przy użyciu przewodu powietrza podłącz nebulizator, w którym znajduje się zalecona przez lekarza ilość leku.
3. Przyłóż maskę do twarzy, wdychaj i wydychaj powietrze w normalny sposób.
4. Zakończ inhalację w momencie zużycia leku.
5. Wyłącz kompresor i umyj akcesoria.

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykiety.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu przedmiotów łatwopalnych lub w miejscach, w których znajdują się materiały wybuchowe.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd.
3rd Floor, Block 1, Longquan Industrial Zone, Huarong Road, Dalang Street, Longhua New District



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

518109 Shenzhen, Chiny