

Corega Tabs Bio Formula, tabletki do czyszczenia protez zębowych, 136 tabletek

Cena: 44,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	136 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki **Corega Tabs Bio Formula** do czyszczenia protez zębowych eliminują 99,9% bakterii odpowiedzialnych za nieświeży oddech, usuwają osad i przebarwienia. Produkt odświeża protezy i czyści je bez ryzyka zarysowań. Działa przeciwbakteryjnie, zapobiegając powstawaniu płytki nazębnej i kamienia oraz związanych z tym podrażnień dziąseł. System czyszczący 4w1, złożony z czterech aktywnych składników, skutecznie utrzymuje protezy w czystości, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc.

Składniki

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, PVP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, CI 42090, CI 73015.

Zastosowanie

Tabletki czyszczące protezy zębowe.

Sposób użycia

- Wrzuć tabletkę do naczynia z taką ilością ciepłej (niegorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę.
- Włóż protezę do roztworu i pozostaw na 3 do 5 minut.
- Następnie wyczyść ją miękką szczoteczką.
- Pozostały roztwór wylej.
- Dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenia

- Działa silnie drażniąco na oczy.
- Zawiera olejek mięty pieprzowej i subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Ważne wskazówki

- Należy dokładnie umyć ręce po bezpośrednim ich kontakcie z tabletkami lub roztworem.
- Trzymać z dala od dzieci oraz osób, które mogłyby połknąć tabletki lub wypić roztwór.
- Roztworu Corega nie należy połykać ani stosować do płukania jamy ustnej.
- Nie dotykać oczu ani ust po kontakcie z tabletkami lub roztworem.
- Tabletki Corega nie wolno spożywać ani wkładać do jamy ustnej.
- Nadają się do namaczania ruchomych aparatów zębowych.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy unikać kontaktu z oczami i jamą ustną.

Dodatkowe informacje

- W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku połknięcia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Producent

STAFFORD-MILLER
Youghal Road, Dungarvan, Irlandia
Co. Waterford