

Cosmopor Opatrunek silicone 10 x 8 cm 5 sztuk



Cena: 36,39 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HARTMANN
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cosmopor Silicone to opatrunek samoprzylepny, który absorbuje wydzieliny z ran, mając jednocześnie warstwę kontaktową z silikonem. Jest idealny do opatrywania ran pooperacyjnych i większych skaleczeń. Może być stosowany również po zabiegach dezynfekcji lub oczyszczania ran.

Składniki

Odporna na zachłapanie włóknina,
Wiskozowa warstwa chłonna z włóknami superabsorbentu (SAF),
Silikonowa warstwa kontaktowa rozmieszczona na całej powierzchni opatrunku.

Zastosowanie

- Zaopatrywanie ran pooperacyjnych i urazowych z umiarkowanym wysiękiem.
- Odpowiedni dla osób z delikatną i wrażliwą skórą, w tym dzieci i osób starszych.

Sposób użycia

- Wyjmij opatrunek ze sterylnego opakowania i usuń przezroczyste zabezpieczenie.
- Oczyszcz ranę, po czym naklej opatrunek w miejscu skaleczenia, tak by warstwa chłonna całkowicie pokrywała ranę.
- Zwróć uwagę, by powierzchnia klejąca nie miała kontaktu z uszkodzoną skórą.
- Wymieniaj w zależności od indywidualnych potrzeb, tak aby opatrunek zawsze pozostał czysty.

Właściwości

- Sterylny,
- Pakowany pojedynczo,
- Delikatny dla skóry,



- Samoprzylepny,
- Chłonny – pochłania i zatrzymuje nawet obfity wysięk,
- Oddychający,
- Odporny na zamoczenie,
- Mocno trzyma się skóry,
- Dostosowuje się do kształtów ciała.

Ostrzeżenia

- Opatrunek do jednorazowego użytku, pojedynczy i sterylny.
- Nie należy używać ponownie ani nie przeklejać raz zastosowanego plastra, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia.
- Jeżeli opatrunek jest mokry, należy zmienić plaster, postępując zgodnie z instrukcją użycia. W innym przypadku może wystąpić zakażenia lub podrażnienie.

Ważne wskazówki

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna saszetka ochronna nie została uszkodzona.
- Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować ponownie.

Producent

Paul Hartmann AG
Straße 12
89522 Heidenheim, Germany