

Cosmopor Silicone, opatrunek chłonny, samoprzylepny, jałowy, z silikonową warstwą kontaktową, 20 cm x 10 cm, 5 sztuk

Cena: 73,40 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COSMOPOR
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Absorbujące, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Cosmopor Silicone to opatrunek samoprzylepny, który absorbuje wydzielającą się ciecz, posiada silikonową warstwę kontaktową i jest przeznaczony do opatrywania ran pooperacyjnych oraz większych skaleczeń. Nadaje się także do stosowania po zabiegach dezynfekcji i oczyszczania ran.

Składniki

- Odporna na zachłapanie włóknina,
- Wiskozowa warstwa chłonna z włóknami superabsorbentu (SAF),
- Silikonowa warstwa kontaktowa rozmieszczona na całej powierzchni opatrunku.

Zastosowanie

- Zaopatrywanie ran pooperacyjnych i urazowych z umiarkowanym wysiękiem.
- Odpowiedni dla osób z delikatną i wrażliwą skórą, w tym dzieci i osób starszych.

Sposób użycia

- Wyjmij opatrunek ze sterylnej opakowania i usuń przezroczyste zabezpieczenie.
- Oczyszcz ranę, po czym naklej opatrunek w miejscu skaleczenia, tak by warstwa chłonna całkowicie pokrywała ranę.



- Zwróć uwagę, by powierzchnia klejąca nie miała kontaktu z uszkodzoną skórą.
- Wymieniaj w zależności od indywidualnych potrzeb, tak aby opatrunek zawsze pozostał czysty.

Ostrzeżenia

- Opatrunek do jednorazowego użytku, pojedynczy i sterylny.
- Nie należy używać ponownie ani nie przeklejać raz zastosowanego plastra, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia.
- Jeżeli opatrunek jest mokry, należy zmienić plaster, postępując zgodnie z instrukcją użycia. W innym przypadku może wystąpić zakażenia lub podrażnienie.

Ważne wskazówki

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna saszetka ochronna nie została uszkodzona.
- Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować ponownie.

Uwagi

5 x samoprzylepny opatrunek chłonny o wymiarach 20 cm x 10 cm

Producent

Paul Hartmann AG
Straße 12
89522 Heidenheim, Germany