

# Cosmopor Waterproof, opatrunek chłonny, samoprzylepny, wodoodporny, jałowy, przezroczysty, 10 cm x 8 cm, 5 sztuk



Cena: 14,92 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COSMOPOR
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Cosmopor Waterproof** to wodoodporny opatrunek samoprzylepny, który absorbuje wilgoć i jest przeznaczony do opatrywania ran oraz skaleczeń. Nadaje się zarówno do ran pooperacyjnych, jak i urazowych z umiarkowanym wysiękiem, szczególnie w przypadkach, gdy potrzebna jest ochrona przed wodą, na przykład podczas kąpieli lub na basenie. Opatrunek jest również odpowiedni do stosowania po zabiegach dezynfekcji i oczyszczania ran.

### Składniki

- Materiał nośny: poliuretan,
- Warstwa stykająca się z raną: siatka polietylenowa,
- Warstwa absorpcyjna: wiskoza,
- Klej: akrylowy, hipoalergiczny.

### Zastosowanie

- Wodoodporne opatrunki do ochrony ran z umiarkowanym wysiękiem, w tym ran po urazie i po operacji.
- Do stosowania po zabiegach oczyszczania, dezynfekcji ran itp.

### Sposób użycia

- Wyjmij opatrunek ze sterylnego opakowania i usuń przezroczyste zabezpieczenie.
- Oczyszczyć ranę, po czym naklej opatrunek w miejscu skaleczenia, tak by warstwa chłonna całkowicie pokrywała ranę.
- Zwróć uwagę, by powierzchnia klejąca nie miała kontaktu z uszkodzoną skórą.
- Wymieniaj w zależności od indywidualnych potrzeb, tak aby opatrunek zawsze pozostał czysty.



### Ostrzeżenia

- Opatrunek do jednorazowego użytku, pojedynczy i sterylny. Nie należy używać ponownie ani zmieniać kierunku raz zastosowanego plastra, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia.
- Jeżeli opatrunek jest mokry, należy zmienić plaster, postępując zgodnie z instrukcją użycia. W innym przypadku może wystąpić zakażenia lub podrażnienie.

### Ważne wskazówki

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna saszetka ochronna nie została uszkodzona.
- Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować ponownie.

### Uwagi

5 x samoprzylepny opatrunek chłonny o wymiarach 10 cm x 8 cm

### Producent

Paul Hartmann AG  
Straße 12  
89522 Heidenheim, Germany