

## Cosmos, plastry na otarcia, 4 sztuki



Cena: 18,58 zł

### Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Marka           | HARTMANN                                                |
| Opakowanie      | 4 sztuki                                                |
| Postać          | plaster                                                 |
| Producent       | PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.                         |
| Przeznaczenie   | Ochronne, Wspomagające                                  |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

### Opis produktu

#### Opis

**Cosmos** to hydrożelowe plastry na otarcia, które chronią uszkodzoną zniszczoną i wspierają jej działanie oraz odbudowę.

#### Działanie

Plastry Cosmos na otarcia oparte są na mechanizmie gojenia ran w środowisku wilgotnym, dzięki czemu cały proces zachodzi szybciej. Ponadto wyrób pochłania nadmiar wysięku wydostającego się z rany, zmniejsza ból i chroni uszkodzone miejsce przed uciskiem lub tarciem.

#### Skład

Produkt wykonany z hydrokoloidu.

#### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do stosowania na otarcia skóry, w szczególności te znajdujące się na kolanach i łokciach.

#### Sposób użycia

1. Umyj dłonie, dokładnie je osusz. Oczyść i osusz skórę w miejscu aplikacji plastra.
2. Wyjmij plaster z opakowania i ogrzej go w dłoniach.
3. Zdejmij jedną część folii ochronnej z dolnej strony plastra.
4. Przyłóż odsłoniętą stronę plastra do rany, następnie zdejmij drugą część folii osłaniającą.
5. Równomiernie dociśnij i wymodeluj brzegi produktu.

#### Ostrzeżenia

- Nie stosować jednego plastra dłużej niż 4 dni.
- Nie stosować na ranach zakażonych, silnie krwawiących i na oparzeniach III stopnia.

- W przypadku cukrzycy, zaburzeń krążenia lub jeśli pojawią się oznaki infekcji (przed lub po aplikacji plastra) np. obrzęk, zaczerwienienie należy skontaktować się z lekarzem.

#### Producent

HARTMANN

Partyzancka 133/151

Pabianice

#### Galeria

