

Criorectum sztyft krioterapeutyczny 1 sztuka

Cena: 62,26 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	sztyft
Producent	PHU MARSYLKA SYLWIA SARNOWSKA GĘBISZ
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Criorectum to zastosowania sztyft krioterapeutyczny, który został poddany leczeniu hemoroidów medycznych, jak i na zewnątrz. Mechanizm działania Criorectum wprowadzony na metody krioterapii miejscowej, który jest dostępny w środowisku naukowym i rozpowszechniany od wielu lat. Dziesięć produktów oferujących 100% kurację. Bezpieczna dla organizmu temperatura, dostępna w Criorectum w warunkach domowych, nieistniejących w żadnym przypadku. Bezpośrednie zastosowanie kontrolowanego charakteru do kanałów odbytu oraz okolic powoduje złagodzenie problemów związanych z hemoroidami, takich jak pieczenie, swędzenie, obrzęk, rozwiązanie i ból.

Zastosowanie

Do leczenia hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych.

Sposób użycia

- Sztyft należy przechowywać w zamrażalniku lodówki lub w zamrażarce wolnostojącej, w pozycji pionowej. Minimalny czas schładzania wynosi 2 godz.
- Przed każdą aplikacją sztyft należy posmarować lubrykantem, ułatwiającym wprowadzenie aplikatora do odbytu.
- Sztyft aplikować doodbytniczo, leżąc na boku. Głębokość aplikacji wyznacza ogranicznik. Czas aplikacji powinien wynosić ok. 8 min.
- Po określonym czasie sztyft wyciągnąć, umyć pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem. Osuszyć, przetrzeć środkiem dezynfekującym i ponownie umieścić w zamrażalniku.

Przeciwwskazania

- Ze względu na fakt, iż hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach stosowania Criorectum nie nastąpi żadna poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Produkt zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy, od momentu pierwszego zamrożenia. Po tym czasie, zaleca się wymianę sztyftu na nowy.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943