

Curaprox, tabletki do wybarwiania płytki nazębnej, PCA 223, 12 tabletek



Cena: 2,36 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	CURADEN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Tabletki Curaprox PCA 223 do wybarwiania płytki nazębnej wspierają utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej. Po ich rozgryzieniu płytka bakteryjna zostaje zabarwiona na czerwono lub niebiesko, co ułatwia dokładne szczotkowanie zębów i zachęca do regularnej pielęgnacji.

Składniki

Glucose, Magnesium Stereate, Sodium Carboxymethyl Starch, Aroma, CI 42090, 45410.

Zastosowanie

Wybarwienie płytki nazębnej w celu poprawy szczotkowania i higieny jamy ustnej.

Sposób użycia

- Rozgryź jedną tabletkę i żuj ją przez około 30 sekund.
- Przetrzyj językiem po zębach.
- Przepłucz usta, aby usunąć nadmiar roztworu.
- Tabletkę po zaaplikowaniu zabarwi starą płytkę nazębną na kolor niebieski, a nową na kolor czerwony.
- Zabarwienie na czerwono wskazuje obszary, które są pomijane sporadycznie.
- Zabarwienie niebieskie wskazuje obszary, które są omijane często.
- Szczoteczką i nićmi dentystycznymi usuń wszystkie przebarwienia.

Ważne wskazówki

- Nie zawiera erytrozyny (E127).
- Tabletki mogą silnie zabarwić elementy stałych aparatów ortodontycznych.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie połykać.

Producent

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens Switzerland

Galeria

