

# Curiosin, żel do pielęgnacji i leczenia ran, 15 g

Cena: 22,73 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                                |
| Opakowanie      | 15 g                                                    |
| Postać          | Żel                                                     |
| Producent       | GEDEON RICHTER PLC.                                     |
| Przeznaczenie   | Gojące, Oslaniające, Regenerujące                       |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                          |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Curiosin, żel 15 g** to wyrób medyczny przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę i rany. Przezroczysta, bezzapachowa formuła nie pozostawia śladów na ubraniach ani skórze. Zawiera kwas hialuronowy – naturalny składnik tkanki łącznej, który wspiera procesy regeneracyjne skóry po urazach. Żel tworzy korzystne środowisko dla gojenia oraz chroni przed działaniem drobnoustrojów z zewnątrz. Sprawdza się w pielęgnacji różnego rodzaju uszkodzeń skóry, takich jak otarcia, skaleczenia, podrażnienia, oparzenia, a także rany powierzchniowe, przewlekłe i pooperacyjne.

### Działanie

Curiosin pomaga w leczeniu uszkodzeń skóry poprzez działanie pierwotne (gojenie bez ziarninowania) lub wtórne (gojenie przez ziarninowanie). Zapewnia odpowiednie mikrośrodowisko oraz chroni skórę przed drobnoustrojami ze środowiska zewnętrznego. Ponadto pomaga w zmniejszeniu wpływu czynników szkodliwych, daje efekt złagodzenia bólu i stanu zapalnego skóry. Preparat pomaga przywrócić skórze jej prawidłowy stan i wygląd.

### Skład

Hialuronian cynku, karbomer 934P (środek żelotwórczy), sorbinian potasu (środek konserwujący), woda do wstrzykiwań.

### Sposób użycia

- Wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.
- Zaburzenia lub problemy skórne: powierzchnię skóry należy oczyścić za pomocą wody, a następnie nałożyć cienką warstwę żelu. Można stosować wielokrotnie.
- Rany po drobnych urazach: zranioną powierzchnię skóry oczyścić za pomocą roztworu soli fizjologicznej lub wody, odczekać aż ustanie krwawienie, a następnie rozprowadzić cienką 1 mm warstwę żelu na ranie. Preparat Curiosin pozostawić do wyschnięcia lub nałożyć opatrunek z gazy i owinąć bandażem. Można stosować wielokrotnie.
- Lekkie oparzenia: schłodzić oparzoną powierzchnię skóry pod strumieniem bieżącej zimnej wody, a następnie rozprowadzić cienką 1 mm warstwę żelu



Curiosin na ranie.

- W przypadku pozostałych ran stosować po konsultacji z lekarzem.
- Po każdym użyciu tubkę należy szczelnie zamknąć.
- Końcówka tubki nie powinna dotykać rany lub jakiegokolwiek innej powierzchni.

#### **Przeciwwskazania**

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieoczekiwanych objawów, zaobserwowania utrzymującego się podrażnienia, zaczerwienienia, zapalenia lub wystąpienia objawów zakażenia oraz jeśli nie pojawią się oznaki gojenia się rany w ciągu kilku dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu lub białko ptasie pochodzenia drobiowego.
- Przechowywać w temperaturze od 5oC do 30oC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność opakowania.
- Preparat przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez jednego pacjenta.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Zużyć w ciągu 4 tygodni od pierwszego otwarcia opakowania.

#### **Producent**

RICHTER GEDEON  
Królowej Marysieńki 70  
Warszawa