

DIAGNOSIS - NARKODIAG test paskowy do wykrywania marihuany, 1 sztuka

Cena: 14,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Test paskowy
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

NARKODIAG od **DIAGNOSIS** to prosty w obsłudze test paskowy służący do wykrywania obecności marihuany. Rezultat badania pojawia się w formie kolorowych linii na pasku testowym.

Zastosowanie

Szybki test paskowy NarkoDiag Marihuana-Test jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ ml.

Sposób użycia

- NarkoDiag Marihuana Test jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i odczycie po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku testowym.
- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod numer +48 (85) 7324 622 lub +48 (85) 7324 099 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie używaj testu, jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Test należy chronić przed dziećmi.
- Test powinien pozostać w zapieczętowanej torebce aż do momentu użycia.
- Wszelkie próbki należy uznać za potencjalnie biologicznie niebezpieczne i traktować tak jak środki zakaźne.
- Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami.
- Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

Właściwości

- Szybki test paskowy do jakościowego wykrywania THC w moczu po użyciu marihuany, haszyszu.
- Tetrahydrokannabinol (THC), jest głównym metabolitem marihuany i haszyszu wykrywanym w moczu wkrótce po zażyciu tych narkotyków. Najczęstszym sposobem zażywania marihuany, haszyszu oraz ziela konopii jest palenie. W zależności od warunków konopie mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, znieczulający lub lekko halucynogeny. Mimo nadawania preparatom konopi właściwości halucynogennych, symptomy używania bardziej zbliżone są do obserwowanych po alkoholu niż po halucynogenach. Efekty po zażyciu narkotyku są widoczne już po 20-30 minutach.
- Obecność metabolitu marihuany (THC) jest wykrywana w moczu w ciągu godziny i przez 3 do 10 dni po zażyciu narkotyku.
- NarkoDiag Marihuana Test jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i odczycie po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku testowym.
- Przed zastosowaniem dokładnie przeczytaj instrukcję użycia. Wyrób do samodzielnego zastosowania, wyłącznie do diagnostyki in vitro, przeznaczony do użytku zewnętrznego.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Producent

DIAGNOSIS

ul. Gen. W. Andersa 38A

15-113 Białystok